

Manual de instrucciones




BJ Adaptaciones
C/ Mare de Déu del Coll, 70, Bajos
08023 Barcelona, Spain
Phone: +34 93 285 04 37
Fax: + 34 93 553 56 34
e-Mail: info@bjliveat.com



BJ-106 Conmutador de varilla

Este conmutador consiste en una varilla acolchada de 11 cm que se puede desplazar en cualquier dirección.

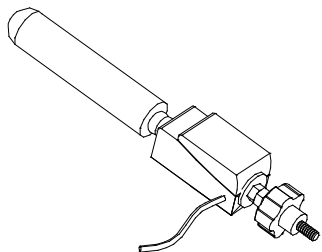

Un desplazamiento de esta varilla activa el conmutador. Este dispositivo es uno de los conmutadores más universales al poder ser activado de múltiples formas.

Modo de empleo

Desplazando la varilla en cualquier dirección y sentido o ejerciendo presión hacia abajo, activaremos la salida de este conmutador. Podremos apreciar que hemos activado la salida mediante el "clic" interno del conmutador. Al dejar de hacer fuerza la varilla vuelve a su posición original.

Características técnicas

- Salida de jack macho mono de 3,5mm.
- Longitud de la varilla: 11cm.
- Medidas (excluyendo la varilla): 72x30x30 mm.
- Tornillo de sujeción: ¼ de pulgada, rosca Whitworth

Mantenimiento y precauciones

- No tire con fuerza el cable.
- No limpie el producto con sustancias que decoloren tejidos.
- No sumergir en líquidos el producto.
- No forzar el desplazamiento de la varilla

Sugerencias

- Este conmutador puede fijarse directamente a cualquiera de los brazos, flexos y soportes de nuestro catálogo.