



Quickstart Guide: Big Beamer™ and Jelly Beamer™ Wireless Transmitters

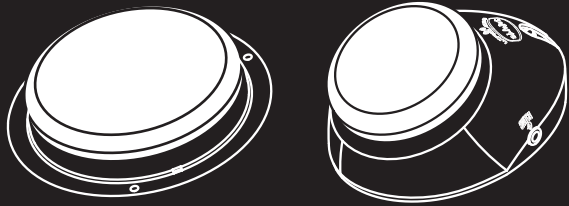


ablenet
www.ablenetinc.com

Guía de inicio rápido: Transmisores inalámbricos Big Beamer™ y Jelly Beamer™

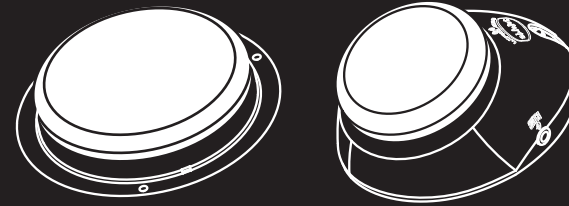

ablenet
www.ablenetinc.com

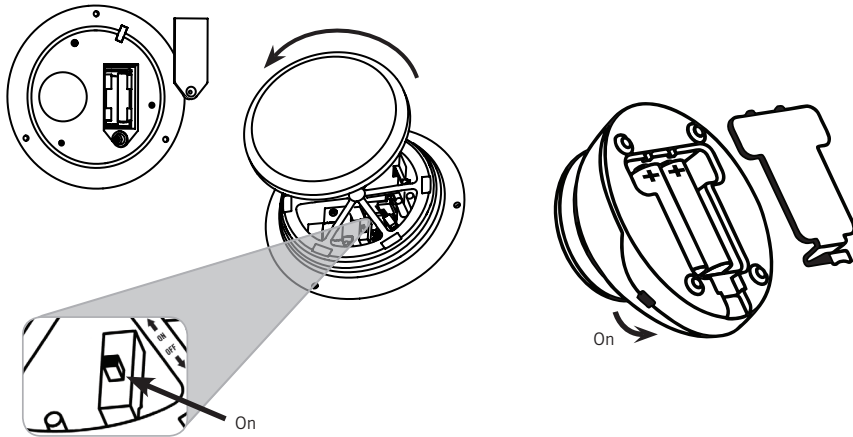

1. Insert two batteries into the Transmitter as shown on housing.

Big Beamer Transmitter uses AAA batteries. Jelly Beamer uses AA batteries.
When batteries are low, the device's light will flash three (3) times.

2. Slide the power switch* to the "On" position.

The Transmitter's light will activate.
*Big Beamer's power switch is located beneath the switch top.


3. Link Transmitter with linkable™ Receivers or other linkable products.

See any linkable product manual for linking instructions.

Additional Information

Visit www.ablenetinc.com for mounting options. Big Beamer and Jelly Beamer Transmitters have an effective range of up to 30 feet. To clean, wipe surfaces with a slightly damp cloth.

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at www.ablenetinc.com. For more information on AbleNet products and services, contact: AbleNet, Inc. Minneapolis/St. Paul, MN | 800-322-0956 | www.ablenetinc.com

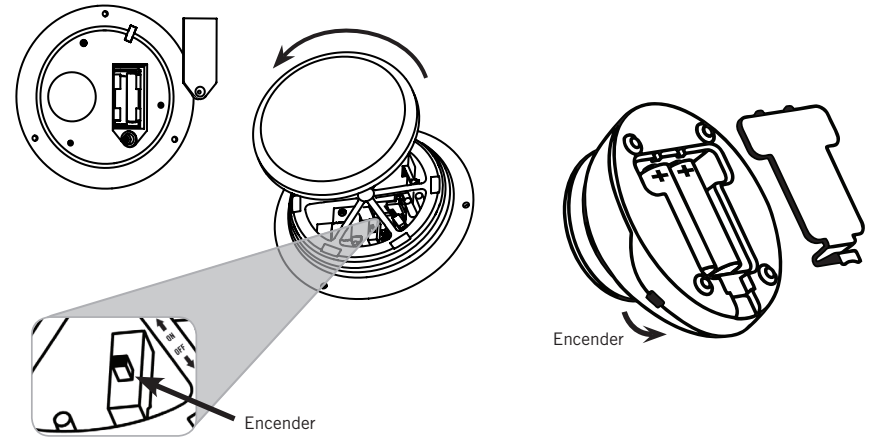

1. Inserte dos pilas AA en el transmisor, tal y como se muestra en el compartimento de las pilas.

El transmisor Big Beamer funciona con pilas AAA. El transmisor Jelly Beamer usa pilas AA.
Cuando la carga de las pilas esté baja, la luz del dispositivo parpadeará tres (3) veces.

2. Mueva el interruptor de encendido* a la posición de encendido "On".

La luz del transmisor se activará.
*El interruptor de encendido del Big Beamer está situado debajo de la parte superior del conmutador.

3 Enlace el transmisor a receptores enlazables linkable™ o a otros productos enlazables.

Consulte el manual del producto enlazable para obtener sus instrucciones de enlace.


Información adicional

Visite www.ablenetinc.com para obtener opciones de montaje. Los transmisores Big Beamer y Jelly Beamer disponen de un rango de acción de hasta 9 m (30 pies). Para limpiarlos, pase un paño ligeramente humedecido sobre su superficie.

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos en los materiales y la fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información sobre devoluciones y reparaciones, se puede obtener en www.ablenetinc.com. Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc. Minneapolis/St. Paul, MN | 800-322-0956 | www.ablenetinc.com


Guía de inicio rápido: Receptores inalámbricos y conmutador con traba y temporizador inalámbricos (SLAT) Linkable™

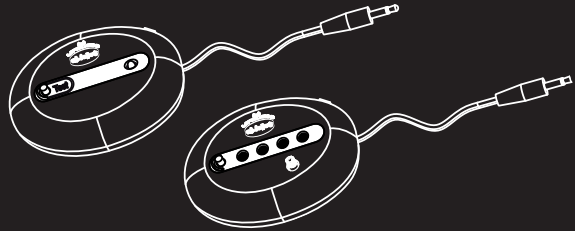

ablenet®

www.ablenetinc.com

1 Inserte las pilas y encienda el receptor

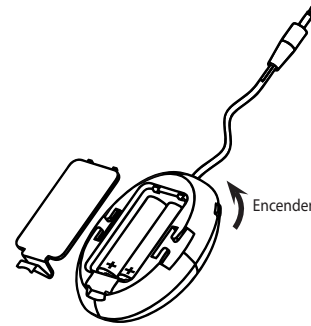


Inserte dos pilas AA en el compartimento del receptor, tal y como se muestra.

Mueva el interruptor de encendido a la posición de encendido ("On"). La(s) luz (luces) del receptor se encenderá(n) brevemente.


Cuando la carga de las pilas esté baja, la luz del dispositivo parpadeará tres (3) veces.

2 Enlace el receptor y el transmisor

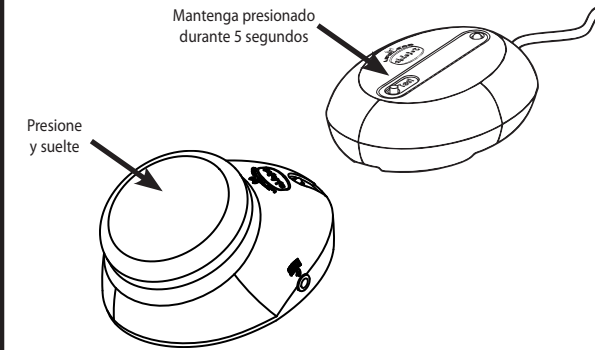

1. Con el transmisor y el receptor inalámbricos encendidos, mantenga presionado el botón "Test" (prueba) o "Mode" (modalidad) hasta que la luz cambie al color verde (aproximadamente 5 segundos).
2. Active cualquier transmisor. La luz del receptor parpadeará en color rojo una vez cuando se haya establecido el enlace. *Para enlazar más transmisores, actívelo ahora (opcional).
3. Presione y suelte el botón "Test" (prueba) o "Mode" (modalidad) para salir de la modalidad de enlace.

3 Conecte el receptor y active el transmisor para Conmutador inalámbrico con traba y temporizador (SLAT)

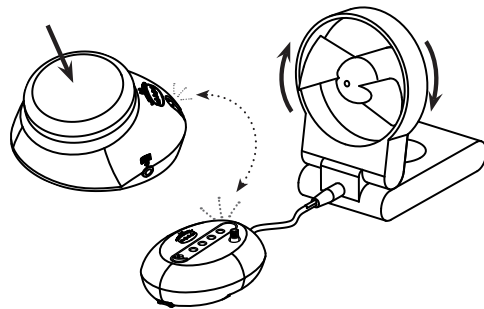

Enchufe el receptor en cualquier dispositivo accesible por conmutador o interfaz de conmutación de computadora.

Active el transmisor.

La luz roja del transmisor y del receptor se iluminará y el dispositivo acoplado se activará.

NOTA: Para comprobar la conexión física con un dispositivo adaptado con un conmutador, mantenga presionado el botón "Test" (prueba) o "Mode" (modalidad) durante 2 segundos.

Seleccione su modalidad de control presionando repetidamente el botón de modalidad (Mode). Las luces del receptor indicarán la modalidad activada. Para las modalidades con temporizador: ajuste el dial del temporizador de 1 a 60 segundos o minutos, según se desee.*

Modalidades de control

Directo Comportamiento de conmutador tradicional: el dispositivo permanece ENCENDIDO durante el tiempo que se mantenga presionado el conmutador.

Programación de segundos Hace funcionar el dispositivo de 1 a 60 segundos con cada activación.

Programación de minutos Hace funcionar el dispositivo de 1 a 60 minutos con cada activación.

Traba La primera activación ENCIENDE el dispositivo; la segunda activación lo APAGA.

*RECOMENDACIÓN DE PROGRAMACIÓN: Gire completamente el dial del temporizador hasta la posición de 60 y active el dispositivo. A medida que se aproxima el tiempo deseado, vuelva a girar el dial hacia la posición de 0 y deténgalo en la posición correspondiente al tiempo deseado. La primera media vuelta del dial del temporizador vale de 1 a 10 segundos/minutos. La segunda media vuelta vale de 11 a 60 segundos/minutos.

T Trucos, recomendaciones y garantía

El receptor tiene ranuras en la parte inferior del dispositivo para su montaje con tiras de Velcro®. Para obtener opciones de montaje adicionales visite www.ablenetinc.com.

Puede enlazar hasta 8 transmisores a un receptor usando el método de enlace descrito en el Paso 2. Cuando la luz de un receptor sea verde, todos los transmisores activados estarán enlazados. Un transmisor también puede enlazarse a múltiples Receptores al mismo tiempo.

Para desenlazar dispositivos, mantenga presionado el botón "Test" (prueba) o "Mode" (modalidad) del receptor durante más de 10 segundos.

Para limpiarlos, pase un paño ligeramente humedecido sobre su superficie.

Información sobre la garantía

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos en los materiales y la fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información sobre devoluciones y reparaciones, se puede obtener en www.ablenetinc.com. Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc.

Minneapolis/St. Paul, MN | 800-322-0956 | www.ablenetinc.com