

# BJ\_859\_R JOYSTICK SIMPLYWORKS

Manual de Instrucciones



 **BJADAPTACIONES**  
tu apoyo, tu tecnología



### 1\_ Descripción del producto

SimplyWorks es el primer sistema inalámbrico de tecnología de apoyo totalmente integrado y diseñado específicamente para usuarios con dificultades motóricas.

SimplyWorks le da la libertad de crear entornos inalámbricos para uno o varios usuarios, reduciendo el tiempo de configuración y permitiéndole concentrarse en las actividades educativas.

El JOYSTICK SIMPLYWORKS puede usarse con cualquiera de los receptores del sistema Simplyworks para acceder al ordenador, controlar juguetes, lámparas, ventiladores o dispositivos adaptados.

El JOYSTICK SIMPLYWORKS responde al más ligero toque de la palanca ya que es el primer Joystick inalámbrico, diseñado específicamente para usuarios con dificultades motoras.

### 2\_ Características

- Funciona con cualquier receptor SimplyWorks para acceso al ordenador o controlar juguetes y dispositivos adaptados.
- Enlace mediante radio frecuencia que permite el
- Funciona sin interferencia en un rango superior a los 10 metros.
- Utiliza una licencia libre de banda de radio ISM de 2.4 GHz global.
- Activación del movimiento del cursor con un ligero toque al joystick (0,5 Newtons).
- Cuatro parámetros de configuración de la velocidad del cursor con feedback auditivo.
- Botones de clic izquierdo, clic derecho y arrastrar/soltar.
- Botones con código de color y montados en bajo relieve
- para evitar pulsaciones involuntarias.
- Dos entradas para conmutador para realizar los clics izquierdo y derecho.

### 3\_ Compatibilidad

El JOYSTICK SIMPLYWORKS es compatible con todos los receptores de la familia SimplyWorks para acceso al ordenador y control de juguetes y dispositivos adaptados.

### 4\_ Poniendo las pilas

Primero retire la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en la parte posterior del dispositivo usando un destornillador. Conecte una pila de 9V PP3/6F-22 o equivalente. Como con cualquier otro dispositivo a pilas, se recomienda el uso de pilas de buena calidad, como Duracell o Energizer para un óptimo funcionamiento.

Si no va a usar su JOYSTICK SIMPLYWORKS durante un largo periodo de tiempo, se recomienda quitar la pila del dispositivo para evitar que la pérdida de electrolito estropee el dispositivo.


### 5\_ Emparejando

Antes de utilizar su JOYSTICK SIMPLYWORKS debe emparejarlo con uno de nuestros receptores SimplyWorks (RECEIVE, CONTROL LITE, CONTROL o CONTROL PRO. Para emparejar las unidades debe seguir el siguiente procedimiento:

- 1 Extraer la tapa de la batería del JOYSTICK SIMPLYWORKS.
- 2 Colocar el receptor aproximadamente a 1 metro de su JOYSTICK SIMPLYWORKS
- 3 Pulsar brevemente el botón de emparejamiento de la unidad receptora. El LED de emparejamiento del receptor parpadeará lentamente.
- 4 En los siguientes 10 segundos, presione el botón de emparejamiento del JOYSTICK SIMPLYWORKS, ubicado en el compartimento de las baterías.
- 5 El LED en el receptor continuará parpadeando durante un breve periodo de tiempo mientras se conecta al emisor. Una vez completado el proceso de emparejamiento, el LED se iluminará durante 5 segundos para indicar que el proceso se ha completado con éxito.
- 6 Si el LED de emparejamiento deja de parpadear después de 30 segundos y no se ha iluminado en ningún momento de forma permanente, repita el proceso desde el paso 3. Si sigue sin



emparejarse de forma correcta, por favor lea el apartado "Solución de problemas"

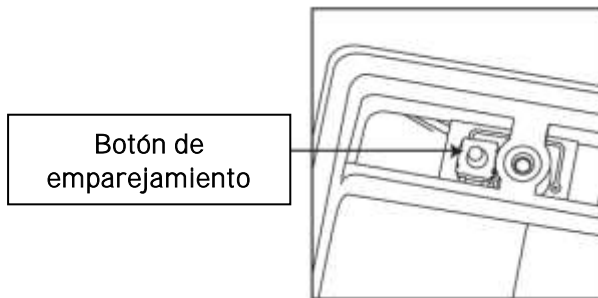

## 6\_ Configurando la velocidad del cursor

El JOYSTICK SIMPLYWORKS tiene cuatro opciones para ajustar la velocidad. Para cambiar la velocidad del cursor presione y mantenga oprimido el botón de bloqueo de arrastre hasta que oiga un pitido y luego suelte.

Para reducir la velocidad del cursor, presione el botón izquierdo (cada vez que presione se reduce gradualmente la velocidad) por el contrario para incrementar la velocidad del cursor presione el botón derecho (cada vez que presione el botón se incrementará de forma gradual la velocidad)

Una vez tenga seleccionado la velocidad adecuada del cursor presione y mantenga oprimido el botón de bloqueo hasta que oiga un pitido. La velocidad del cursor ya está configurada.

## 7\_ Mantenimiento

Su JOYSTICK SIMPLYWORKS no dispone de piezas de sustitución para el usuario. Si es necesario realizar una reparación, el producto deberá ser devuelto a Pretorian Technologies o a un distribuidor autorizado.

## 8\_ Solución de Problemas

Si su JOYSTICK SIMPLYWORKS no funciona correctamente, por favor siga las siguientes instrucciones para determinar la causa. Si después de seguir estas instrucciones, la unidad sigue sin funcionar, por favor contacte a su proveedor antes de devolverla.



Síntoma	Posible Causa / Solución
La unidad no funciona, no hay movimiento del cursor y el LED permanece iluminado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La unidad no está emparejada – siga el proceso de emparejamiento.</li> <li>• Las pilas del JOYSTICK SIMPLYWORKS están descargadas. Reemplácelas.</li> <li>• Revisar la conexión USB del receptor al PC</li> </ul>
La unidad funciona de forma errática o intermitente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las pilas están bajas o descargadas. Reemplácelas</li> <li>• Está fuera del rango de activación. Acerque el JOYSTICK SIMPLYWORKS al receptor o viceversa.</li> <li>• Hay interferencia. Ubique los dispositivos fuera de dispositivos que puedan interferir en la conexión</li> </ul>
La unidad no se empareja. El LED se apaga después de 30 segundos sin iluminarse de forma permanente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las pilas están descargadas en el receptor o en el JOYSTICK SIMPLYWORKS. Reemplácelas.</li> <li>• Asegúrese que las unidades están cerca (1 metro aprox) mientras se realiza el proceso de emparejamiento.</li> </ul>

## 9\_ Garantía

Su JOYSTICK SIMPLYWORKS tiene garantía de 24 meses para defectos de producción y fallos de componentes. El dispositivo ha sido diseñado para su uso en aplicaciones en el ámbito doméstico y educativo. El uso fuera de estas áreas invalida la garantía. La modificación o reparación NO autorizada, abuso mecánico, inmersión en cualquier líquido o la conexión con algún equipo o dispositivos incompatible también invalida la garantía.





**BJ ADAPTACIONES**  
tu apoyo, tu tecnología

c. Mare de Déu del Coll, 70, bajos  
08023 Barcelona | Spain  
t. +34 93 285 04 37 | fax +34 93 553 56 34  
info@bj-adaptaciones.com

**[www.bj-adaptaciones.com](http://www.bj-adaptaciones.com)**