




Guía de inicio rápido Mini Beamer™ Transmisor y receptor

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956


PN 98000021 (07/13 Rev. A)

Receptor Mini Beamer

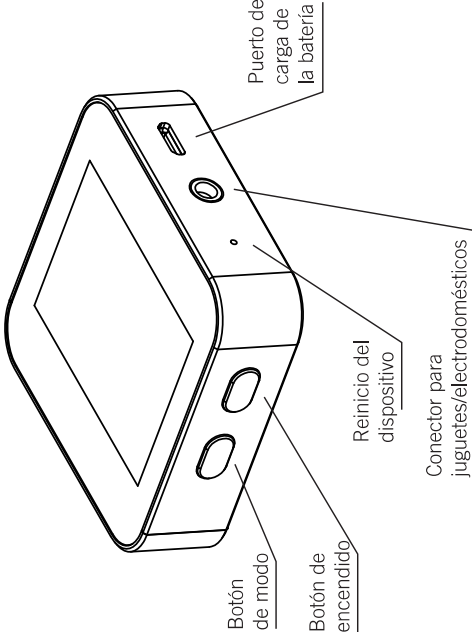

Para cargar, seleccione el adaptador de pared adecuado para su región. Coloque la parte del micro USB del cargador de pared en el puerto de carga de la batería del receptor Mini Beamer y enchufe el adaptador de pared en la toma de corriente. Mientras se esté cargando, un símbolo de enchufe parpadeará junto al indicador de la batería del receptor inalámbrico. Cuando se haya cargado completamente, el símbolo de enchufe permanecerá encendido.

Transmisor Mini Beamer

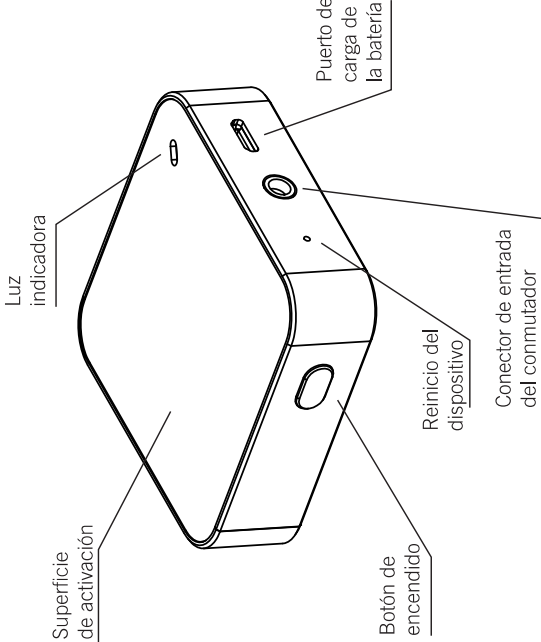

Funcionamiento del transmisor Mini Beamer

Actívelo presionando el botón de encendido durante 5 segundos para activar y desactivar el transmisor inalámbrico.

El transmisor Mini Beamer se debe emparejar con un receptor inalámbrico AbleNet para que funcione. Un transmisor se puede emparejar con varios receptores inalámbricos para activar varios elementos al mismo tiempo.

Para activar, coloque un dedo u otra parte del cuerpo a menos de 10 mm de la superficie de activación o toque la superficie de activación. La luz del indicador parpadeará y sonará un pitido al activarse. La luz del indicador parpadeará y sonará un pitido por segunda vez al desactivarse.

Para cargar, seleccione el adaptador de pared adecuado para su región. Coloque una parte del micro USB del cargador de pared en el puerto de carga de la batería del transmisor Mini Beamer y enchufe el adaptador de pared en la toma de corriente. Mientras se esté cargando el indicador, una luz parpadeará. Cuando el indicador se haya cargado completamente, la luz permanecerá encendida.

Funcionamiento del receptor Mini Beamer

Actívelo presionando el botón de encendido durante 5 segundos para activar y desactivar el receptor inalámbrico.

El receptor Mini Beamer se debe emparejar con un transmisor inalámbrico AbleNet y el adaptador de enchufe a enchufe se debe conectar al dispositivo que intenta hacer funcionar con un conmutador. Un receptor se puede emparejar con hasta ocho transmisores inalámbricos para permitir que varias personas participen al mismo tiempo.

Para ingresar al modo de emparejamiento, mantenga presionado el botón de modo durante 5 segundos. Active cada transmisor inalámbrico para emparejarlo con el receptor inalámbrico. Active el botón de modo para salir del modo de emparejamiento.

Seleccione el modo de funcionamiento deseado activando el botón de modo.

- Directo: El dispositivo se activa directamente al activar el transmisor inalámbrico.
- Segundos: El dispositivo se activa de 1 a 60 segundos luego de activar el transmisor inalámbrico. Active el botón de encendido para cambiar los segundos.
- Minutos: El dispositivo se activa de 1 a 99 minutos luego de activar el transmisor inalámbrico. Active el botón de encendido para cambiar los minutos.
- Bloqueo: El dispositivo se activa y permanece encendido al activar el transmisor inalámbrico. Active el transmisor inalámbrico por segunda vez para desactivar el dispositivo.

Nota: Este equipo ha sido revisado y se ha determinado que cumple con los límites referentes a los dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar un grado razonable de protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Asimismo, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte con el servicio técnico de AbleNet o con su distribuidor local para recibir ayuda.

Información adicional

Visite el sitio www.ablenetinc.com para obtener opciones de montaje. Los transmisores y receptores Mini Beamer tienen un rango eficaz de alcance de hasta 30 pies.

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre los defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. La garantía, junto con la información de devolución y reparación, se encuentra disponible en el sitio www.ablenetinc.com.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, comuníquese con:

AbleNet, Inc., 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113

1-800-322-0956

www.ablenetinc.com