

BJ-882 Licornio
Manual de uso



 **BJ Live!**
smart solutions that suit you



Características generales

Marca: BJLive

Modelo: BJ-882

Peso: 155 grs.

Uso del producto

Ajuste de la sujeción a cabeza:

- La correa dispone de velcros para ajustar a la medida de la cabeza **(1)**

Ajuste del ángulo de la barra:

- Aflojar el tornillo que se encuentra en el extremo de la barra enganchado a las correas de la cabeza. **(2)**
- Ajustar el ángulo deseado y apretar el tornillo hasta que la barra quede fijada

Ajuste del largo de la barra:

- Para conseguir el largo deseado, agarrar fuertemente con una mano el extremo de la varilla de fibra de carbono (la parte negra de la barra) **(3)** poniendo la mano encima de las conteras de goma y con la otra mano coger el extremo de la varilla de acero **(4)**
- Hacer pequeños giros, apretando o estirando la varilla, según queramos alargar o acortar.

Advertencia: no se debe tomar por el anclaje que está situado en la frente para efectuar el movimiento rotatorio que nos deha alargar o acortar la barra.

Ajuste de la medida del apuntador:

- La varilla apuntador **(5)** permite ajustar en su extremo un lápiz para tabletas táctiles o un pincel o lápices de colores, girando el tornillo blanco de nylon hasta que el elemento quede bien fijado.





Garantía:

Dispone de 12 meses de garantía por defectos de fábrica.

Cualquier alteración no autorizada o modificaciones del producto anularán esta garantía.

Servicio postventa

Si, a pesar de la correcta manipulación, el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

BJ Adaptaciones

C/ Mare de Déu del Coll, 70, Bajos

08023 Barcelona

España

Phone: +34 93 285 04 37

Fax: + 34 93 553 56 34

e-Mail: info@bj-adaptaciones.com

