

LOOK Lab

Primeros pasos

Creado por

Smartbox

This guide provides the basics for getting started with Look Lab.

Obtén más información sobre los recursos de Look Lab en Smartbox Hub:

hub.thinksmartbox.com/looklab



Smartbox

Document: Look Lab - Manual - ES - A
Based on: Look Lab - Manual - UK - A
Language: Spanish
Date of issue: June 2023

Copyright © 2023 Smartbox Assistive Technology



Primeros pasos

1.	Instalación	4
2.	Selección de actividades	6
3.	Pantalla de inicio de las actividades	8
4.	Pantalla de pausa	10
5.	Opciones	14

1


Instalación

Para empezar a utilizar Look Lab, debes instalar el software. .

Ve a nuestro sitio web para descargar el instalador de Look Lab: **thinksmartbox.com/look-lab**

A continuación, ve a la carpeta de descargas en el dispositivo y ejecuta el instalador.

Cuando el instalador se abra, selecciona **Siguiente > Instalar**. Una vez finalizada la instalación, haz clic en el icono que aparece en el escritorio para abrir Look Lab.

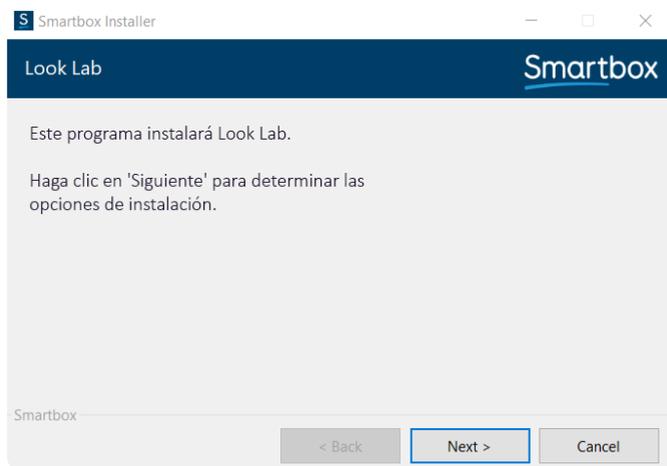



En la pantalla de bienvenida, se muestran las opciones siguientes:

Comprar

Selecciona esta opción para adquirir una copia de Look Lab en nuestra tienda en línea.

Activar

Si ya tienes una clave de licencia, selecciona esta opción para introducirla. Debes tener conexión a Internet.

Si ya has activado la licencia, selecciona **Empezar**.

2

Selección de actividades

Las actividades se seleccionan en la pantalla de inicio y se dividen en cinco categorías:



Diversión: juegos relajantes y fáciles de aprender.



Retos: juegos más complejos y estratégicos con un límite de tiempo.



Puzles: actividades donde hay que resolver problemas.



Creatividad: actividades centradas en música o arte.



Atención plena: actividades causa-efecto sencillas para relajarse y gestionar el tiempo en pantalla.

Favoritos

El lugar donde se muestran las actividades que haces con más frecuencia. Una vez seleccionada una categoría, escoge una actividad para iniciarla u obtener más información.

Los galones en los bordes te permiten cambiar de pantalla. Selecciona Atrás para volver a la selección de categorías.



3

Pantalla de inicio de las actividades

La pantalla de inicio de las actividades muestra información y opciones antes de empezar una actividad.

Modo Fácil o Estándar



El modo Fácil te permite realizar la actividad al ritmo que quieras, sin preocuparte por perder vidas al equivocarte o quedarte sin tiempo.

El modo Estándar es más competitivo, ya que la vidas y el tiempo son limitados, y la dificultad puede aumentar a medida que avanzas.

Habilidades

También verás una lista de las **habilidades** para la mirada que aprenderás con esta actividad.

Habilidades:

Exploración, Seguimiento,
Reacciones,

Añadir a favoritos

Esto añadirá la actividad actual a la categoría Favoritos. Si vuelves a seleccionarla, la eliminará.



Añadir a favoritos

Empezar

Cuando todo esté listo, selecciona Empezar para iniciar la actividad.


Atrás

Vuelve a la selección de actividades.

4

Pantalla de pausa

Si la actividad está en marcha, puedes pausarla en cualquier momento con la celda **Pausa**.

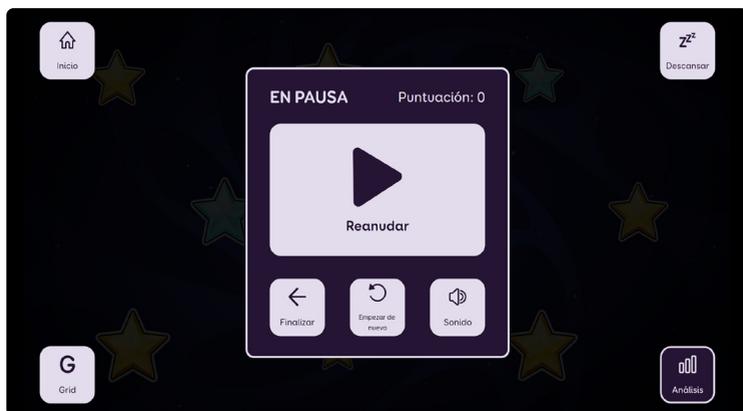

Utiliza la celda Pausa para descansar o seleccionar una de estas acciones: Reanudar, Finalizar, Reiniciar, Audio o Grid.

Reanudar

Continúa desde donde lo dejaste. Se mostrará una cuenta atrás con el tiempo que tienes para prepararte.

Finalizar

El juego actual finalizará, y volverás a la

pantalla de inicio de las actividades. Usa esta opción si quieres cambiar el nivel de dificultad.

Reiniciar

Vuelve a empezar la actividad con la configuración actual.

Audio

Activa o desactiva música de fondo y efectos de sonido; sube o baja el volumen.

Grid

Cambia al software Grid. Si Grid está abierto, se mostrará la última cuadrícula que hayas utilizado. De lo contrario, se abrirá Grid y se mostrarán el paquete de cuadrículas predeterminado o Grid Explorer (según la configuración).

Puedes cambiar a una cuadrícula de comunicación o de posicionamiento de mirada.

Esta opción solo se mostrará si has instalado el software Grid.

Análisis

Accede a un «**mapa térmico**» con las zonas de la pantalla a las que se ha accedido. Puedes guardar la imagen para registrar tus logros y progresos a medida que avanzas.



Descansar

Pausa el acceso por espera en todas las celdas, excepto esta. Vuelve a seleccionarlo o reanuda el acceso mediante el puntero de cabeza o la mirada.

Inicio

Vuelve a la pantalla de inicio para seleccionar categorías y opciones o salir de Look Lab.

5

Opciones

El botón Opciones se muestra en todas las páginas de actividades, así como en la pantalla de inicio.

Consta de cuatro elementos: Control, Accesibilidad, Sonido y visualización, y Ayuda.



Control

Seguimiento de ojos

Si se conecta una mirada compatible, se activará automáticamente para que puedas utilizarla. No obstante, si deseas utilizar un método de acceso alternativo (por ejemplo, un puntero de cabeza) o el software de control

del puntero que se proporciona con la cámara, puedes desactivar el acceso a la mirada aquí.

Consejo: Utiliza el paquete de cuadrículas Grid 3 de Look Lab para usar el acceso por control del ordenador con otros métodos de acceso y seguimiento de ojos.

Tiempo de espera

Esto ajusta el tiempo que se esperará a que un objetivo realice una selección. Puedes probar los tiempos de espera en esta pantalla.

Cursor

Indica si quieres mostrar el cursor como flecha, punto o mirilla.






Accesibilidad


Aspecto

Selecciona un estilo visual minimalista o detallado. El modo Detallado tiene imágenes y fondos coloridos, mientras que el Mínimo es más básico para reducir las distracciones.

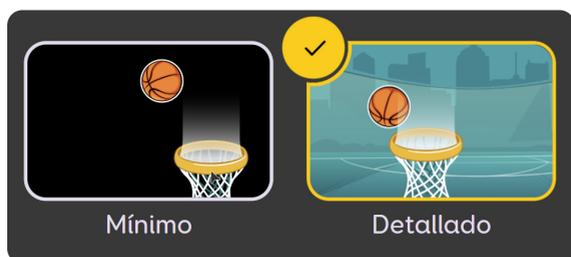

Restricciones

Look Lab ofrece tres niveles de acceso.

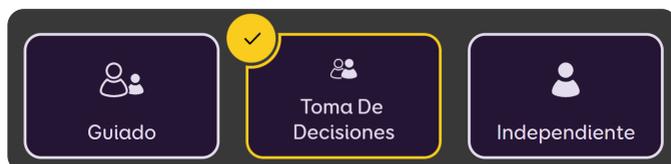

El modo Guiado requiere un asistente o compañero de comunicación que ayude al usuario durante el proceso de selección de actividades con el ratón, el teclado o la pantalla táctil. Los usuarios solo pueden acceder en las actividades.

El modo Toma de decisiones funciona igual que el Guiado, pero los usuarios también pueden esperar antes de seleccionar o cerrar actividades.

El modo Independiente permite que los usuarios completen el acceso sin restricciones.



Los botones accesibles de espera tienen este aspecto.



Los botones accesibles táctiles y seleccionables tienen este aspecto.



Sonidos y visualización

Pantalla completa

Indica si quieres usar Look Lab en pantalla completa o en una ventana del escritorio.



Sonido

Las opciones de sonido te permiten activar o desactivar música de fondo y efectos de sonido, así como subir o bajar el volumen.



Ayuda

Guías

Accede al manual y el cuadernillo de Look Lab.

Información y actualizaciones

Comprueba el código de licencia y el número de versión del software. Consulta y solicita actualizaciones de software.

Privacidad

Indica si quieres compartir o no datos de uso anónimos con Smartbox para ayudarnos a mejorar y solucionar problemas de Look Lab.

LOOK Lab



hub.thinksmartbox.com/looklab

Smartbox

Look Lab - Manual - ES - A