

COMUNICADORES DINÁMICOS



BJ Adaptaciones / CATÁLOGO 2017

“¡Tienes mucho que decir!”



BJADAPTACIONES
tu apoyo tu tecnología

“Mi táctica es hablarte
y escucharte,
construir con palabras
un puente indestructible”

Fragmento de un poema de **Mario Benedetti**

COMUNICADORES VOX PRO. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN

pág.

3/ Los comunicadores Vox Pro incluyen **todo lo que necesitas** para la comunicación.

Ofrecen soluciones para personas que dan sus **primeros /4 pasos** en la comunicación,

5/ están desarrollando el **lenguaje**

o ya pueden utilizar la **escritura. /7**

8/ Permiten la comunicación cara a cara y también la **comunicación a distancia.**

También son una poderosa herramienta para el **aprendizaje y el ocio** accesible **/9**

10/ y podrás convertirlo en tu mando a distancia gracias al **control de entorno.**

Sea cual sea tus capacidades a nivel físico podrás **acceder** a tu comunicador de una forma cómoda. **/11**

12/ Complementa tu comunicador con los mejores sistemas de **soporte.**

Utiliza la guía que te ayudará a **elegir el dispositivo** que mejor se ajusta a tus necesidades. **/13**

COMUNICADORES VOX: TODO LO QUE NECESITAS, INCLUIDO

SOFTWARE

Grid 3 / El mejor programa de comunicación y acceso existente.

Programa de asistencia remota / Podremos ayudarte con tu comunicador sin que te desplaces.

Back up automático / Cada vez que tengas conexión a Internet se hará una copia de tu configuración.

Edición remota / Tus allegados pueden modificar la configuración desde cualquier otro ordenador.

HARDWARE

Tableta / Potente ordenador tipo tableta elegido para la comunicación. (1)

Altavoces inalámbricos / Disfruta de su brillante sonido en ambientes ruidosos. (2)

Correa / Llévate colgado tu comunicador de 8 u 11 pulgadas donde quieras. (3)

Apoyo de mesa / Ubica tu comunicador encima de cualquier superficie plana. (4)

Funda rugerizada / Tu comunicador queda protegido de golpes, polvo o salpicaduras. (5)

Tarjetas Training Cards / Aprende los principales trucos de tu comunicador y personalízalo. (6)

Maleta de transporte / Traslada cómodamente el comunicador de un lugar a otro. (7)

SERVICIOS

Todo instalado / Arranca tu comunicador y todo estará optimizado para la comunicación

4 horas de soporte y formación / Todo el apoyo para enseñarte a utilizarlo y personalizarlo.

Formación on-line / Tendrás acceso a nuestra plataforma on-line de formación


Opción de recuperación / Almacenamos una copia de tu comunicador para restaurarlo como el primer día.



GRID 3




COMUNICACIÓN A TU MEDIDA

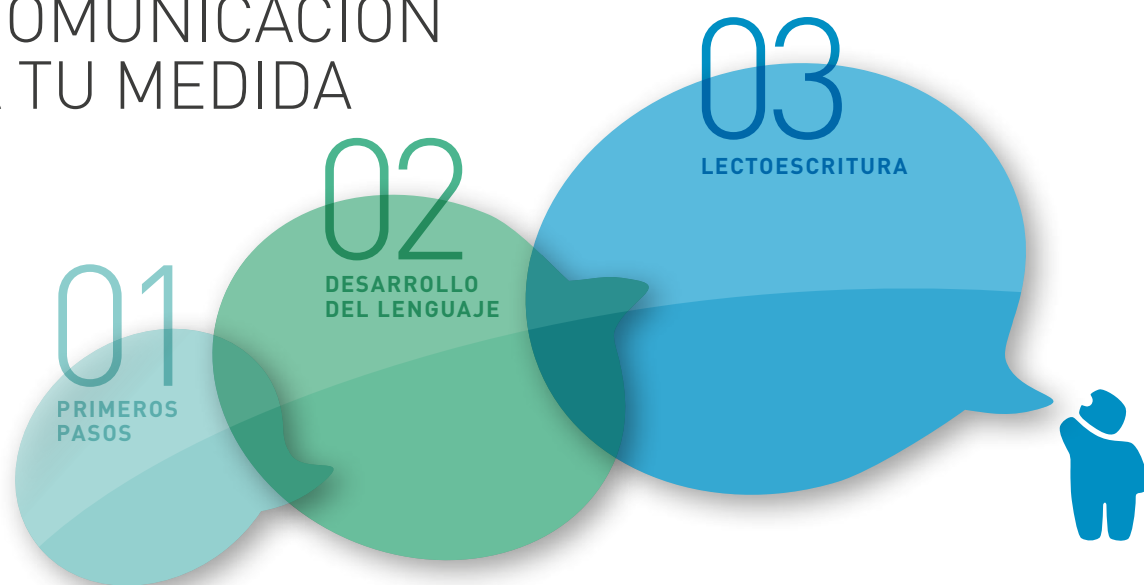

Los comunicadores Vox están preparados sea cual sea la necesidad de comunicación y favorecen la evolución.


01 PRIMEROS PASOS

Para las personas que se inician y deben adquirir las habilidades comunicativas básicas las actividades accesibles incluidas en los comunicadores Vox son la solución ideal. Permiten desarrollar progresivamente la intención comunicativa, la simbolización, el acceso, la gestión de turnos, la categorización... ¡Diviértete mientras aprendes los trucos para comunicarte!

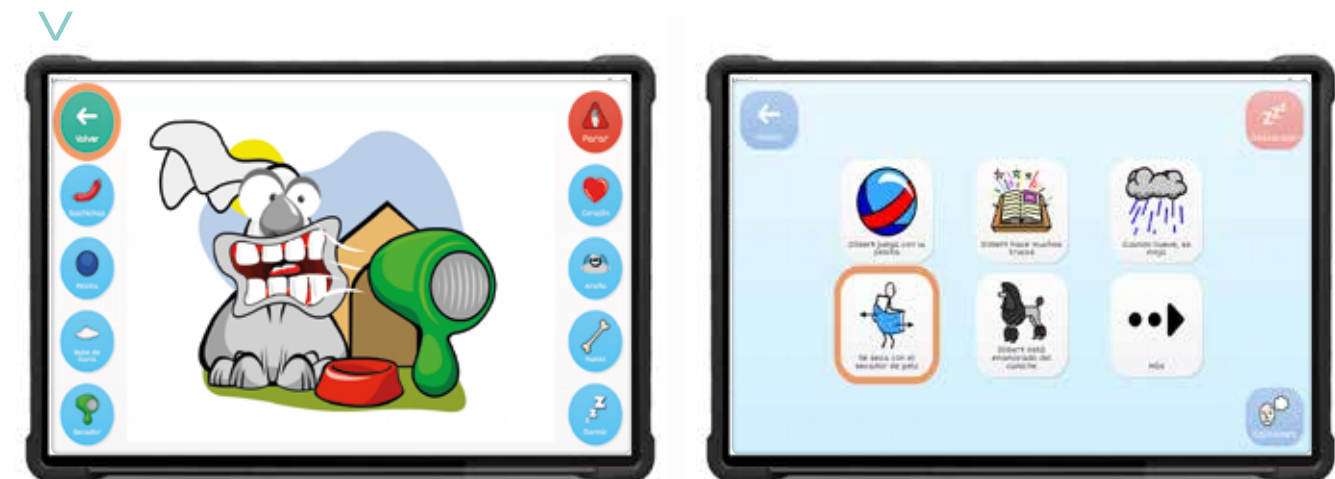

! 25 actividades divertidísimas con sus vocabularios asociados para facilitar el progreso

Para personas que ya han adquirido las habilidades básicas de la comunicación, los 4 vocabularios expertos de los comunicadores Vox son la mejor herramienta para el desarrollo del lenguaje y una comunicación sin límites. Son el resultado de la investigación de expertos junto con usuarios buscando la adaptación a cada momento del desarrollo del lenguaje.

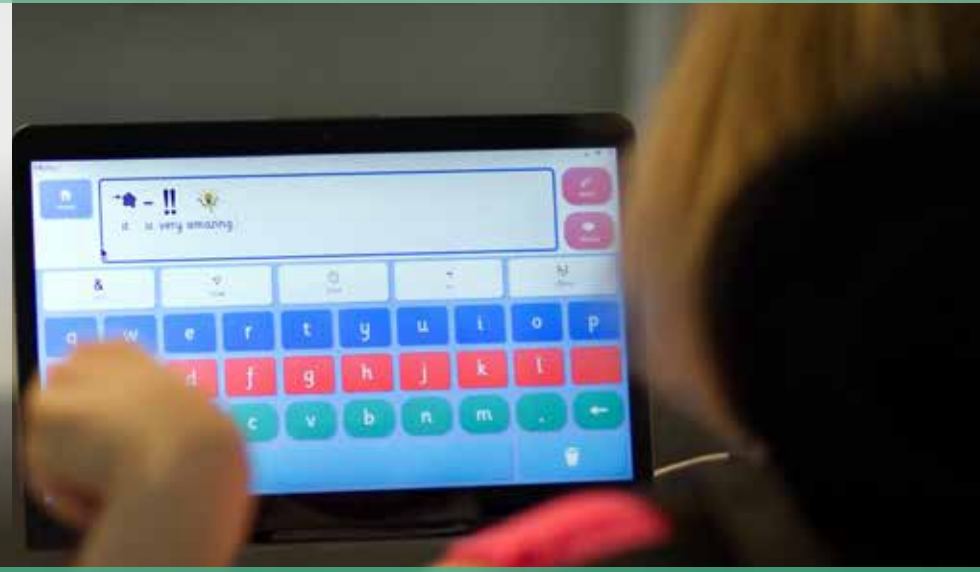

✓ vocabularios expertos incluidos

SYMBOL TALKER

A

2100

símbolos categorizados, orientado a **frases de 2 elementos**

SYMBOL TALKER

B

5800

símbolos categorizados, orientado a **frases de 3 elementos**

SYMBOL TALKER

C

6000

símbolos categorizados, **organización con vocabulario núcleo**

SYMBOL TALKER

D

8000

símbolos categorizados, **organización con vocabulario núcleo**

Cuatro razones por las que es importante disponer de vocabularios amplios y bien organizados

- Es fácil encontrar vocabulario según los temas de interés del usuario
- La estructura del comunicador es la misma para todo el proceso de aprendizaje
- Facilita la enseñanza de nuevo vocabulario
- Ahorra tiempo a los familiares y profesionales

Trucos y consejos


Personaliza el vocabulario

Incorpora fácilmente imágenes tuyas o de Internet, fotos de la cámara del comunicador o cualquier símbolo Widgit (12000 pictogramas), Symbol Stix (26000) o Arasaac.



Simplifica al principio

Ocultas temporalmente las categorías y palabras que puedan distraer. Puedes empezar sólo por una y poco a poco ir mostrando el resto.

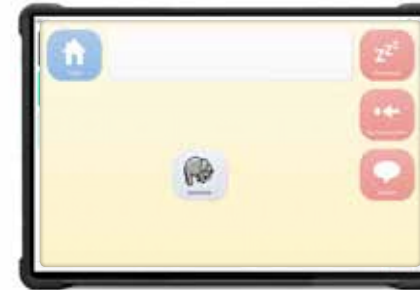

Combina con el teclado

Siempre puedes disponer de un teclado con predicción para empezar a jugar con el alfabeto.



Utiliza la predicción de símbolos

El comunicador puede sugerirte el símbolo siguiente al escrito según frecuencia de uso.

Deja que el comunicador conjugue

Si quieres, el programa conjuga automáticamente los verbos para que los mensajes sean más naturales.



Agrega conjuntos de palabras rápidamente

Puedes copiar cualquier texto desde el portapapeles y automáticamente se crean celdas con símbolos para cada palabra.

Voces e idiomas

Escoge las voces de mejor calidad en tu idioma favorito.

NOTA: la voz en algunos idiomas supone un pequeño coste adicional, consúltanos.



Cuadrículas de charla rápida

Utiliza las cuadrículas de charla rápida para decir frases completas apretando un solo botón y facilitar la gestión de la conversación.



LECTOESCRITURA

Para personas con dificultades en el habla y con capacidad de utilizar el alfabeto nuestros comunicadores son la solución ideal.




PREDICCIÓN

La mejor tecnología de predicción SwiftKey para ir más rápido y corregir errores.



NOTAS

Crea tus propios documentos de forma cómoda y accesible para almacenar y/o comunicar mensajes más largos.

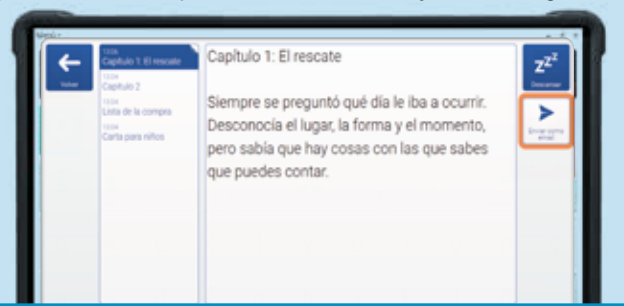

MENSAJES GRABADOS

Utiliza las 165 frases de máximo uso ya creadas para decir lo que quieras con una sola pulsación o añade tus propias frases favoritas.




HISTORIAL DEL CHAT

Escribe una sola palabra y encontrarás todas las frases que has utilizado con la misma. Las sugerencias mejoran dependiendo de si estás en casa, trabajo, escuela....



VOCES


Escoge las voces de mejor calidad en tu idioma favorito.

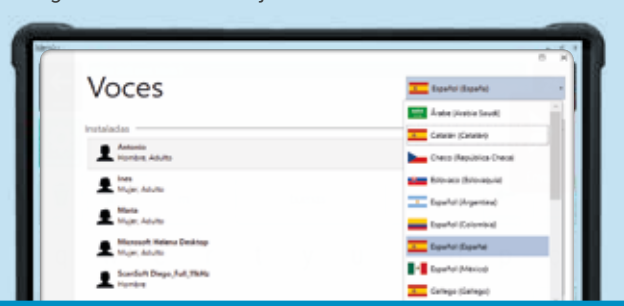

NOTA: La voz en algunos idiomas supone un pequeño coste adicional, consúltanos.

Comunicación fluida adaptada a tu movilidad

COMUNÍCATE TAMBIÉN A DISTANCIA

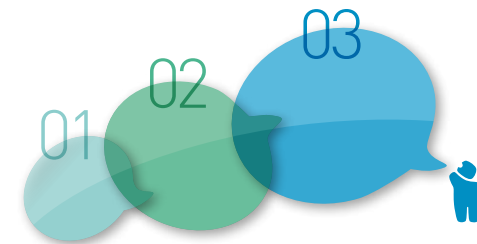

Tanto si usas símbolos como texto puedes hacer muchas más cosas con tu comunicador



TWITTER
Accede, lee y publica en Twitter con tu sistema de acceso y de forma simple.



FACEBOOK
Ponte al día de las novedades de tus amigos y publica tu estado de forma accesible.



EMAIL
Escribe correos electrónicos con el alfabeto o con pictogramas. Puedes escuchar los correos recibidos y simplificar todo el uso.



TELÉFONO
Llama a tus amigos y familia desde el comunicador de forma accesible y utiliza los vocabularios y frases del comunicador para mantener una conversación a distancia. Sólo tienes que emparejarlo con un teléfono móvil.



MENSAJERÍA
Chatea mediante mensajes SMS utilizando pictogramas o texto con tus contactos favoritos. Los mensajes recibidos se pueden simbolizar automáticamente y ser oídos.

DIVIÉRTETE Y ELIGE TU OCIO

Disfruta del ocio con tu comunicador y vive intensas experiencias que, a su vez, potenciarán la comunicación. Sea cual sea el nivel de comunicación y la movilidad, es posible ofrecer acceso adaptado a la música, videos y otros muchos recursos para divertirse.



MÚSICA

Accede a todas las canciones que te gustan con un acceso personalizado y simplificado.




NAVEGADOR WEB

Navega por tus páginas favoritas, incluso con la mirada o con un solo pulsador




VIDEOS

Visualiza y controla la reproducción de tus videos favoritos en el comunicador.

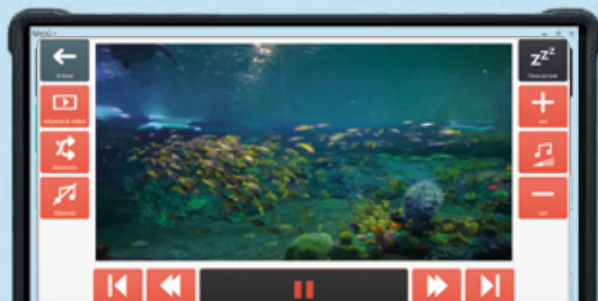


FOTOGRAFÍA

Disfruta de tus fotos preferidas y haz nuevas fotos con la cámara del comunicador.

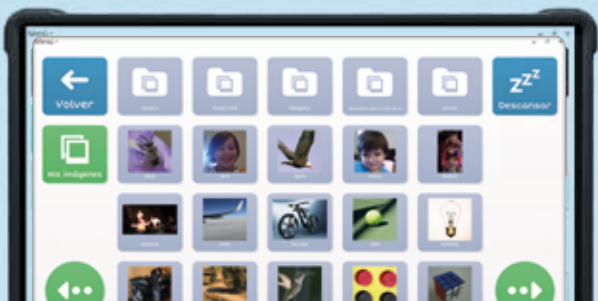


YOUTUBE

Accede a todos los contenidos de Youtube de forma simple y accesible.

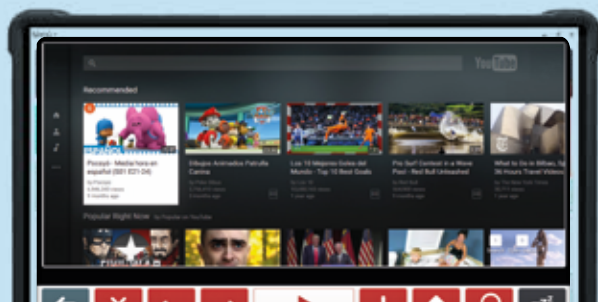

RELOJ

Puedes oír y ver la hora y fecha en cualquier momento, así como utilizar su cronómetro.

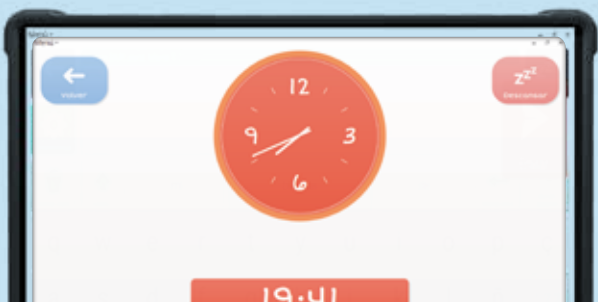

CONTROLA TODO TU ENTORNO

Controla la televisión, equipo de música, luces, puertas, cama, avisos... con tu comunicador, sea cual sea tu forma de acceso, gracias al accesorio Control USB.

Cómo controlar la televisión desde el comunicador en tres sencillos pasos

1. Elige el botón que quieras programar y entra en el modo grabación
2. Aprieta el botón del mando original de la televisión.



3. El botón ya está memorizado en tu comunicador y puedes utilizarlo siempre que quieras

¡Repite este proceso con todos los botones que quieras de cualquier elemento de la casa con mando a distancia!

¿Quieres más?

Añade receptores y podrás controlar el encendido y apagado de cualquier electrodoméstico o generar una señal acústica remota para avisar a un familiar.



DISFRUTA DEL ORDENADOR

Puedes disfrutar de cualquier otro programa del ordenador que incluye cada comunicador. Si tu forma de acceso es con la cabeza, mirada o pulsadores, podrás hacerlo con múltiples comodidades y opciones de configuración.




ACCEDER DE LA FORMA MÁS CÓMODA

Puedes acceder a todas las opciones del comunicador de la forma que más te convenga.

PANTALLA TÁCTIL

Aprieta sobre los mensajes que quieres reproducir. Existen numerosas opciones de personalización para personas con temblores o hipotonía.

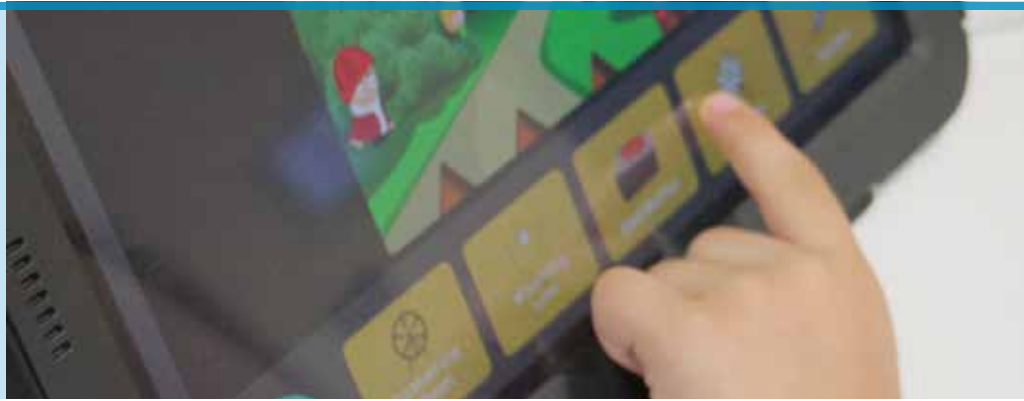

JOYSTICK DE LA SILLA DE RUEDAS

Gracias a BJOY Ring puedes acceder mediante el movimiento del joystick de la silla.



MOVIMIENTO DE LA CABEZA

SmartNav4, Quha y BJOY Chin son tres productos que permiten acceder mediante el movimiento de la cabeza.



MIRADA

Con los comunicadores Vox Eye la celda que mires es la que se reproducirá.



CONMUTADORES

Accede a todo apretando uno, dos o más pulsadores con cualquier parte del cuerpo. Existen innumerables opciones de personalización de este tipo de acceso para que sea óptimo.



SUJETA FIRMEMENTE

La sujeción de los comunicadores es muy importante para su acceso cómodo, continuado y seguro.

BRAZO EXTRAÍBLE Y ORIENTABLE

Sujeta el comunicador de manera firme a cualquier silla de ruedas y ubícalo en la posición perfecta. Cuando lo retires y lo vuelvas a colocar, quedará en la posición original. También es posible girarlo a 90/180/270°.

SOPORTE DE PIE

Es ideal, tanto para acercarlo a una silla de ruedas, a un sofá o a una cama. Su diseño es robusto, versátil y seguro.



SOPORTE DE SOBREMESA

Con este brazo puedes posicionar el comunicador sobre una mesa y modificar de forma segura y robusta su posición e inclinación.



ELIGE TU COMUNICADOR

Encuentra toda la información para elegir el comunicador más adecuado.

<p>VOX 8 PRO Comunicación que se lleva a todas partes.</p>	
<p>VOX 11 PRO Versatilidad para llevar encima o en silla de ruedas..</p>	
<p>VOX 11 EYE PRO La opción más accesible de control con la mirada</p>	
<p>VOX 12 PRO Gran potencia y tamaño para un comunicador portátil</p>	
<p>VOX 12 EYE PRO Control con la mirada en un dispositivo de 12 pulgadas</p>	
<p>VOX 21 EYE PRO Gran pantalla para utilizar desde la cama, sofá o externo a la silla de ruedas.</p>	
<p>I12 PRO e I15 PRO Los comunicadores todo terreno de Tobii</p>	

TABLA DE MEDIDAS EXTERNAS

Vox 8 Pro / 21,5 x 13 cm
Vox 11 Pro / 28 x 17,7 cm
Vox 12 Pro / 29 x 20 cm
I-12 / 30,7 x 27,4 cm
I-15 / 36,9 x 32,6 cm
Vox 21 / 52,7 x 36,3 cm

Nuestro equipo de asesores está a tu disposición para ayudarte en la elección.

	VOX 8 PRO	VOX 11 PRO	VOX 11 EYE PRO	VOX 12 PRO	VOX 12 EYE PRO	VOX 21 EYE PRO	I15 PRO
HARDWARE							
Tamaño de la pantalla	17 x 11 cm	24 x 13,5 cm	24 x 13,5 cm	26 x 17,5 cm	26 x 17,5 cm	47 x 27 cm	30 x 23 cm
Sujeción para mano	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Correa para colgar	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Funda rugerizada	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Sujeción sobremesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con soportes BJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Altavoces	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Integrados
Maleta de transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Training Cards	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de entorno	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	IR incluido
Cambio de baterías en caliente	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Dispositivo sanitario	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Apagar/encender con la mirada	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Acceso a Windows	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Procesador	+++	+++	+++	++++	++++	+++	++++
SOFTWARE							
Programa incluido	Grid3	Grid3	Grid3	Grid3	Grid3	Grid3	Tobii Communicator y Grid 3
Paquetes de cuadrículas	27	27	27	27	27	27	27
Soporte técnico remoto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Back up automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Edición remota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACCESO							
Pantalla táctil	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Acceso por conmutador	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incluido
Acceso por ratón	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Acceso por mirada	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓ Integrado
SERVICIOS							
Todo instalado/optimización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 horas de formación/soporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opción de recuperación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acceso a Academia on-line a formación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Estamos a tu lado

Contacta con nuestro equipo de asesores
y técnicos especializados.
Dispones de alguno cerca tuyo.

t: +34 93 285 04 37 | info@bjadaptaciones.com

www.bjadaptaciones.com



*¡La última tecnología
siempre a tu alcance!*

Consulta la última versión
de este catálogo y el listado de precios
en el apartado Comunicación y Lenguaje
de nuestra página web.