

Guía de inicio rápido: Comunicador Talking Brix™



www.ablenetinc.com

Cómo programar su Talking Brix™


1. ENCIENDA el dispositivo usando el interruptor de encendido en la parte trasera. (La luz roja del dispositivo parpadeará una vez).
2. Mantenga presionado el interruptor durante 5 segundos. (Comience a hablar cuando la luz roja del dispositivo comience a parpadear). *NOTA: El dispositivo reproducirá una porción de cualquier mensaje grabado.*
3. Suelte la parte superior del interruptor cuando termine de hablar. (La luz del dispositivo se apagará). *NOTA: El Talking Brix puede almacenar hasta 10 segundos de audio.*
4. Pulse el interruptor para REPRODUCIR el mensaje. (La luz roja del dispositivo parpadeará una vez cuando sea activado).

Para usar símbolos de imágenes de hasta 32 mm (1,25 pulg.), levante la tapa a presión para conmutador con la uña.

Montaje y desmontaje

Use las lengüetas y las ranuras de su Talking Brix para crear un dispositivo de comunicación para múltiples mensajes. Los Brix individuales se pueden organizar en diferentes configuraciones para satisfacer las necesidades específicas del usuario.

Monte cualquier Talking Brix usando el imán incorporado o coloque el gancho y la cinta de Velcro® en la hendidura de su parte trasera.

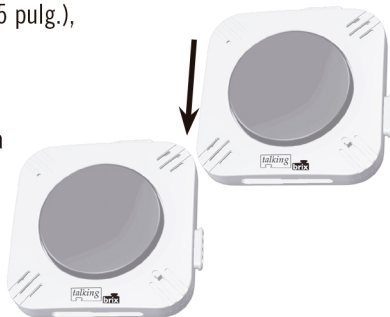

Suministro eléctrico del Talking Brix

Cuando la carga de la pila del Talking Brix sea baja, la luz parpadeará 3 veces después de reproducir el mensaje. Conecte el Talking Brix al cargador de pared incluido. La luz ROJA permanecerá encendida durante la carga; cuando la carga se haya completado, se encenderá la luz verde.

NOTA: El Talking Brix no puede usarse mientras se está cargando.

Información sobre la garantía/reparación/devolución

AbleNet ofrece una garantía limitada de dos años en el producto comunicador Talking Brix. Para obtener más información sobre la garantía, visite www.ablenetinc.com

Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet:

AbleNet, Inc., | Minneapolis/St. Paul, MN | 800-322-0956 (EE.UU. y Canadá) | Internet: www.ablenetinc.com

© 2009 AbleNet, Inc., Todos los derechos reservados