



Guía de inicio rápido: Comunicador progresivo SuperTalker™

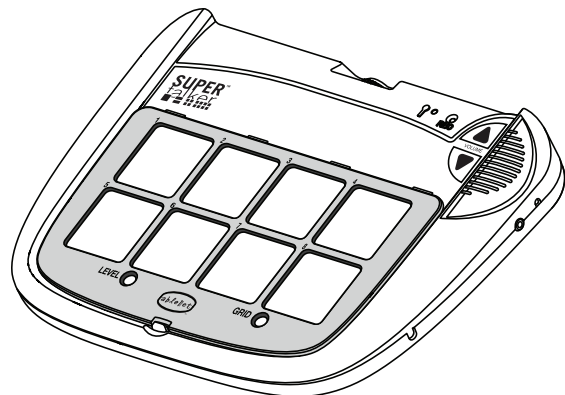


Accesorios de superposición e ideas disponibles en www.ablenetinc.com

1 Encendido del comunicador SuperTalker

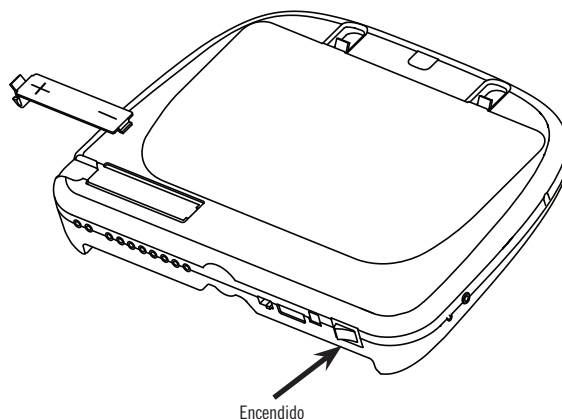

Inserte cuatro pilas AA en el dispositivo, tal y como se muestra. El botón de encendido/apagado está situado en el canto del dispositivo.

2 Seleccione el nivel y la red

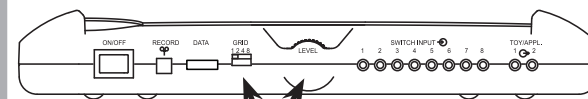


Realice los ajustes necesarios

Con el accesorio de superposición y el protector de teclado deseado y colocados en su lugar:
Seleccione un NIVEL (1-8) y una Red (1, 2, 4, 8) utilizando los controles situados en el canto del dispositivo.

NOTA: Asegúrese de que el número de la Red coincida con el accesorio de superposición y el protector de teclado actualmente instalados en el dispositivo.

Para obtener información sobre los accesorios de superposición, los protectores de teclado y otros consejos útiles, vea el reverso de esta guía.

3 Ingrese en la modalidad de grabación

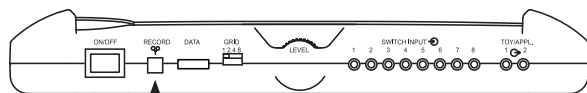


Mantenga presionado,
y a continuación suéltelo

Mantenga presionado el botón de grabación "RECORD" hasta que se encienda la luz de grabación, y a continuación suéltelo.

4 Grabe mensajes

Mantenga presionado
mientras habla

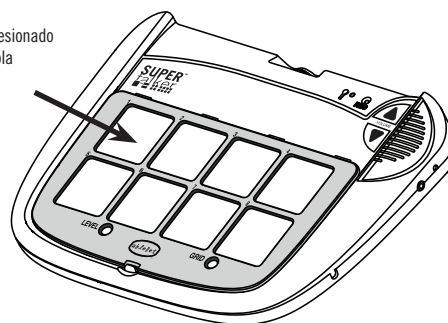


Mantenga presionada la localización deseada para el mensaje y comience a hablar cuando oiga un pitido. Suéltela cuando haya terminado.

Repita el procedimiento para grabar mensajes adicionales.

La luz de grabación "RECORD" se iluminará de forma intermitente mientras esté grabando.

NOTA: Hable cerca del micrófono para obtener un sonido alto y claro.

5 Salga de la modalidad de grabación

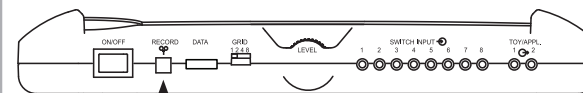


Presione y suelte

Presione y suelte el botón de grabación "RECORD" para salir de la modalidad de grabación.

NOTA: Este dispositivo dispone de 16 minutos de tiempo total de grabación. La luz de grabación "RECORD" cambiará al color amarillo cuando sólo queden dos minutos.

Características avanzadas

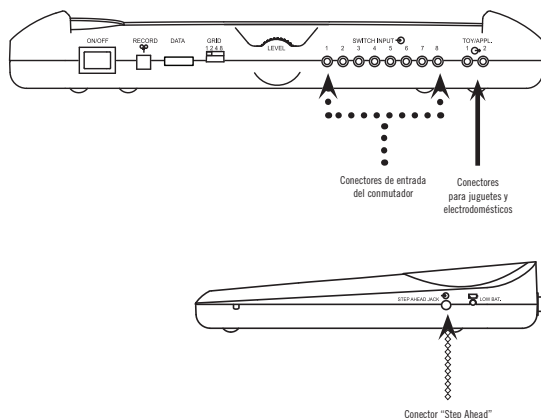

Reproducción de un mensaje con un conmutador externo

Acople el conmutador que desee con un conector de 3,5 mm (1/8") a los conectores de entrada del conmutador y continúe usándolo tal y como lo hacía antes. (Los conectores se indican con la línea de puntos)

NOTA: Los conectores de entrada del conmutador se corresponden con las localizaciones de mensajes 1 - 8, de izquierda a derecha, dependiendo de la red utilizada.

Control de juguetes y electrodomésticos

Conecte cualquier juguete o electrodoméstico adaptado a un conmutador, al conector TOY/APPL. Cuando el comunicador SuperTalker esté activado, el juguete o electrodoméstico acoplado a él se activará durante el tiempo que dure el mensaje grabado. (Los conectores se indican con la línea continua)

NOTA: Los conectores para juguetes y electrodomésticos (TOY/APPL) se corresponden con las dos primeras localizaciones de mensajes en el comunicador SuperTalker. Para controlar un electrodoméstico se necesita una unidad PowerLink® 3. Para obtener información sobre cómo adaptar juguetes y electrodomésticos, visite www.ablenetinc.com

Uso del conector "Step Ahead"

Acople el conmutador que desee al conector "Step Ahead" para acceder a los mensajes, de forma consecutiva y desde la localización 1 a la 8. (Los conectores se indican con)

NOTA: El conector Step Ahead se desplazará a través de las localizaciones de mensajes, según la red seleccionada.

Protectores de teclado y accesorios de superposición



Información sobre los protectores de teclado

El comunicador SuperTalker incluye protectores de teclado en formatos de 1, 2, 4, y 8 redes. Suelte el protector de teclado instalado presionando la perilla que sujeta su parte central inferior. Los pequeños números en la parte superior de cada localización de mensaje corresponden a los conectores de los conmutadores externos (véase la información anterior).

Almacenamiento del protector de teclado

El área de almacenamiento del protector de teclado en la parte posterior del comunicador SuperTalker tiene cabida para 3 protectores de teclado. En esta área también se pueden guardar los accesorios de superposición de papel.

Accesorios de superposición en blanco

Los accesorios de superposición en blanco para el comunicador SuperTalker están disponibles en www.ablenetinc.com

Consejos útiles

Recomendaciones de grabación

Mientras esté en la modalidad de grabación, si el comunicador SuperTalker no se activa después de 20 segundos, el dispositivo saldrá de la modalidad de grabación.

Borrado general - Mantenga presionado el botón de grabación "RECORD" durante 10 segundos para borrar todos los mensajes del comunicador SuperTalker.

Recomendaciones de reproducción

Si el protector de teclado en uso no se corresponde con la red seleccionada, el comunicador SuperTalker no reproducirá el mensaje correcto.

Si presiona una localización de mensaje en la que no se ha grabado ningún mensaje, la luz de grabación RECORD se encenderá de forma intermitente con un color amarillo.

Controles de volumen



Bloquee o desbloquee de los controles de volumen del comunicador SuperTalker presionando simultáneamente las localizaciones de mensajes derecha e izquierda.

Al ajustar el volumen,
Luz de grabación "RECORD" amarilla – Volumen desbloqueado
Luz de grabación "RECORD" roja – Volumen bloqueado o máx/mín

Opciones de montaje

En www.ablenetinc.com hay disponibles una variedad de opciones de montaje para el comunicador SuperTalker.

Plano del producto y garantía

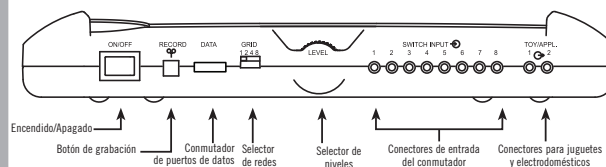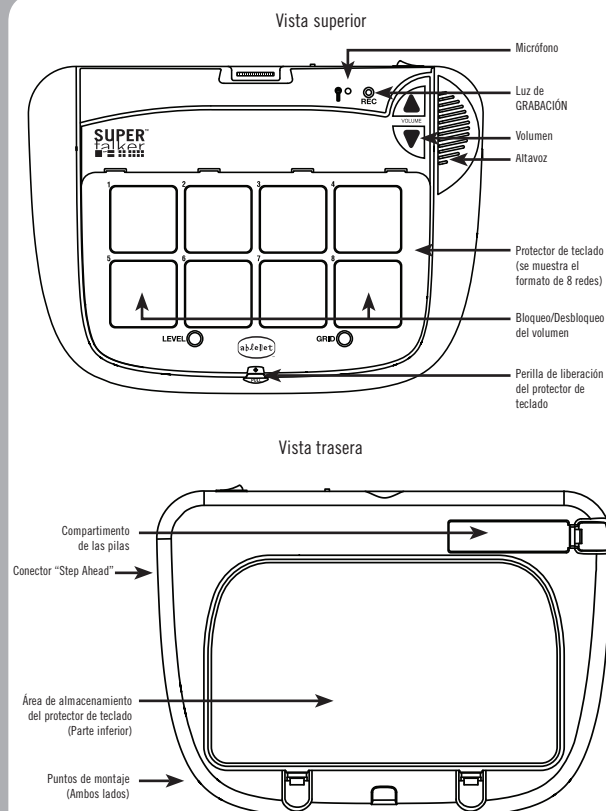

Garantía/Reparación/Información de devolución

AbleNet ofrece una garantía limitada de dos años en el comunicador progresivo SuperTalker. Para obtener información detallada sobre la garantía, visite www.ablenetinc.com

Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956 (Estados Unidos y Canadá)
Internet: www.ablenetinc.com
© 2008 AbleNet, Inc., Todos los derechos reservados