

AttainmentCompany's **GoTalk[®] 4+**

la guía del
usuario

diodos emisores de luz (LED)
verdes que indican nivel

micrófono

altavoz

GoTalk⁴⁺

Attainment Company, Inc.

teclas de vocabulario
esencial

17 segundos cada una

teclas de mensaje

10 segundos cada uno en los

niveles 1-4

20 segundos cada uno en el
nivel 5

vista reversa

Botón para GRABAR

interruptor
de
encendido
borrar nivel

compartimento
para pilas

LED rojo de grabar

control de volumen

botón para cambiar de
nivel

protector incorporado de
teclas

encarte plástico

etiqueta de plantilla
y almacenamiento de
plantillas
(ayudas audiovisuales/
dibujadas no incluidas)

tiempo total de
grabación:
4.6 minutos
(274 segundos)

tamaño: 23cm x 30,5cm x 2,9cm peso: 625g

instrucciones

para grabar las teclas de mensaje

¡Encienda el comunicador GoTalk 4+ y oirá un pitido! Oprima y suelte el botón de grabar. Los LED de nivel (verde), y de grabar (rojo), se encenderán.

Mientras estén encendidos, oprima y suelte la tecla de mensaje donde quiere grabar. Mientras oprima la tecla de mensaje, el LED de grabar parpadea para indicar que está grabando.

Cuando termine el mensaje, oprima cualquier tecla para terminar la grabación. Continúe a grabar cada mensaje, o grabe el nivel entero. Cuando haya grabado todos sus mensajes (o el nivel entero/los niveles enteros), oprima y suelte el botón de grabar.




para escuchar un mensaje

Oprima y suelte una tecla de mensaje; la luz verde de nivel parpadeará. Se escuchará el mensaje que grabó.

niveles

Para cambiar de nivel, oprima y suelte el botón para cambiar de nivel que se ubica debajo de los LED verdes. El LED verde que indique el nivel actual parpadeará. Oprímalo otra vez para cambiar a otro nivel. Inserte la plantilla que corresponda al nuevo nivel.

Para borrar nivel, oprima y suelte el botón para grabar que se ubica en el respaldo del aparato. Pulse el botón para cambiar el nivel al nivel que quiere borrar. Inserte la punta de un bolígrafo o un clip en el agujerito (Borrar Nivel) que se encuentra en el respaldo del equipo. Se borrará el nivel entero. Repita estos pasos para borrar otros niveles. Borrar el nivel no borra las palabras o frases esenciales del vocabulario.

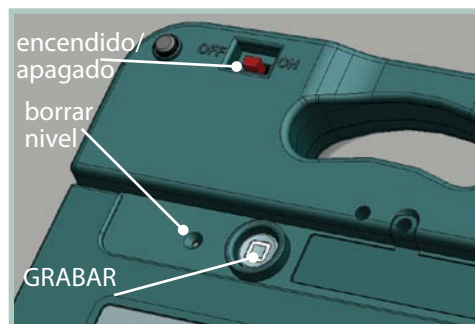

vista reversa



características de bloqueo

Eliminar el uso no deseado de estos botones.

• **Bloqueo de nivel**—para activar el bloqueo de nivel, siga estas instrucciones: oprima y sujete el botón de grabar en el respaldo del aparato. El LED de grabar (rojo) y el LED de nivel (verde) se encenderán. Mientras todavía está oprimiendo el botón de grabar, oprima y suelte el botón de volumen (bajo). El LED de grabar y el LED de nivel se apagarán para mostrarle que el bloqueo de nivel está encendido.

• **Bloqueo de grabación**—para activar el bloqueo de grabación: oprima y sujete el botón de grabar en el respaldo del equipo. El LED de grabar (rojo) y el LED de nivel (verde) se encenderán. Mientras todavía oprima el botón de grabar, oprima y suelte el botón de volumen (alto).

Para deshacer el bloqueo de nivel y de grabación: apague el aparato. Mientras está apagado, sujete el botón de grabar y encienda el aparato. La luz del LED verde se enciende y pasa por cada nivel, y el LED de grabar se enciende brevemente y emite un pitido..

vocabulario esencial

2 teclas de mensajes esenciales de vocabulario

Siga las instrucciones arriba para grabar un mensaje. Los mensajes esenciales de de vocabulario permanecen constantes en cada nivel hasta que los borre y grabe un nuevo mensaje.

Hi



Bus

tamaño real de las teclas de mensaje esenciales

¡Estos 5 mensajes pueden ser adaptados para funcionar en cualquier situación!

idea uno



idea dos



El vocabulario esencial debe ser usado para mensajes que son comunicados frecuentemente. Estos mensajes pueden incluir saludos, comentarios, preguntas comunes, o necesidades básicas. Los mensajes del vocabulario esencial permanecerán los mismo en cualquier nivel.

crear plantillas

software de plantillas para el Comunicador GoTalk™ (GoTalk Overlay Software)

¡Crear plantillas es fácil con software de plantillas para el GoTalk (GoTalk Overlay Software)! Este software incluye más de mil fotos e ilustraciones. Además, usted puede pegar sus propias imágenes en cualquier plantilla. Las celdas vacías de la plantilla pueden contener una imagen, un texto (en cualquier lengua) o ambos. Las características de editar permiten que usted cambie el color, el tamaño, y la letra del texto. Mueva, amplíe, gire, y recorte fotos. Las plantillas están incluidas con todos los productos GoTalk. Ahorre archivos de plantillas y comparta con otros usuarios de GoTalk. (Los productos GoTalk y el software de plantillas para el GoTalk se venden por separado).

ideas de implementación

Puede usar su GoTalk 9+ para muchas actividades. Aquí hay solamente algunas de las posibilidades:

- aparato de comunicación expresiva y aumentativa
- actividades modificadas de currículo
- proporcionar ayudas visuales y auditivas del lenguaje
- dar instrucciones por ambientes o trabajos
- usar en un programa de inglés como segundo idioma (ESL)

ideas



plantillas

¡Hay muchas maneras de hacer plantillas para el GoTalk 9+!

- usar el software de plantillas para el GoTalk (GoTalk Overlay Software)
- escribir palabras en una plantilla blanca con un marcador
- cortar/pegar fotos o ayudas de símbolos en la plantilla
- poner velcro en cada cuadro y añadir/pegar una ayuda de textura para las personas con discapacidades visuales

compartimiento para el almacenamiento de plantillas

Ahora puede almacenar por lo menos una plantilla para cada nivel en el compartimiento para el almacenamiento de plantillas. ¡Esto se lo hace más fácil cambiar plantillas cuando cambia ambientes o temas de conversación! Almacene su guía del usuario aquí también.



Attainment Company, Inc.

P.O. Box 930160 • 504 Commerce Parkway
Verona, WI 53593-0160 • USA • Teléfono 1-800-327-4269
LLAMADAS INTERNACIONALES 1-608-845-7880

www.AttainmentCompany.com