



Fast Talker

Primeros pasos

Contenidos

Presentación de Fast Talker	3
Disponible en dos tamaños	4
Uso de Fast Talker	5
Teclado del chat	7
Área del chat y funciones	7
Teclado de Fast Talker celdas grandes	9
Herramientas del chat	10
Historial del chat	12
Eliminar una frase del historial del chat	13
Modo privado	13
Mensajes	14
Añadir y eliminar frases	14
Banco de mensajes	15
Redes Sociales	16
YouTube	16
Facebook	18
Twitter	20
Teléfono	22
Responder	25
Mensaje de Texto	25
Correo electrónico	27
Control de entorno Servus	30
Navegador Web	34
Control del ordenador	36
Notas	39
Música y vídeo	41
Cámara	43
Calculadora	44
Contactos	45
Ajustes	46

Presentación de Fast Talker

Fast Talker está diseñado para ayudar a las personas a comunicarse rápidamente, a mantenerse en contacto con amigos y familiares y a estar conectados con el mundo.

Es una solución completa para los usuarios de CAA con lectoescritura, con aplicaciones para la comunicación rápida por texto, banco de mensajes, SMS, correo electrónico, navegación por Internet, control del entorno y mucho más. También incluye herramientas para controlar el ordenador, lo que te permite el acceso total al software de Windows.

- ✓ Comunicación rápida por texto
- ✓ Aplicaciones accesibles y fáciles de usar
- ✓ Tecnología de banco de mensajes
- ✓ Herramientas para el control total del software de Windows
- ✓ Fácil de editar y personalizar
- ✓ Versión de celdas completa para proporcionar todas las necesidades de acceso
- ✓ Diseñado para todas las formas de acceso

Fast Talker está diseñado para personas con lectoescritura utilizando las siguientes formas de acceso:



Táctil



Mirada




Conmutador



Cursor

Disponible en dos tamaños

Fast Talker está disponible en dos tamaños, para satisfacer las necesidades de acceso de los diferentes usuarios de CAA. Ambas versiones tienen la misma funcionalidad, para que puedas acceder a las mismas características y recursos.

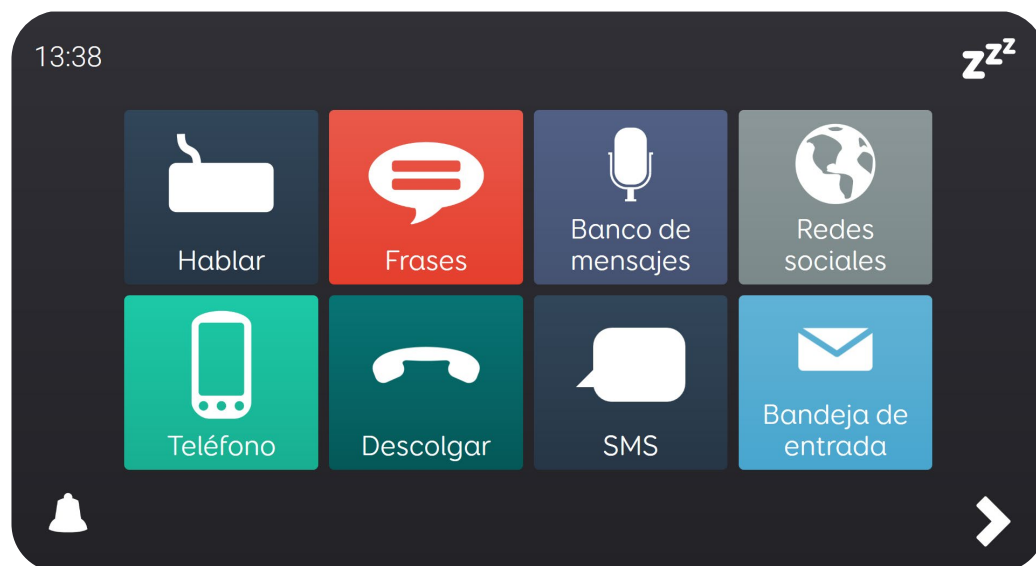

Fast Talker




Fast Talker - Celdas grandes

El paquete de cuadrículas Fast Talker estándar está configurado para personas que pueden utilizar celdas más pequeñas, y cuenta con más celdas en cada cuadrícula.

Fast Talker - Celdas grandes permite a las personas que necesitan celdas más grandes acceder a todas las funciones de Fast Talker. Cuenta con un teclado basado en la frecuencia de uso que divide las letras en dos cuadrículas, donde las letras más utilizadas aparecen primero.

Uso de Fast Talker

Tendrás acceso a todas las aplicaciones de Fast Talker desde tu cuadrícula de inicio. En Fast Talker cada aplicación tiene una celda de Inicio que te devolverá a esta pantalla.

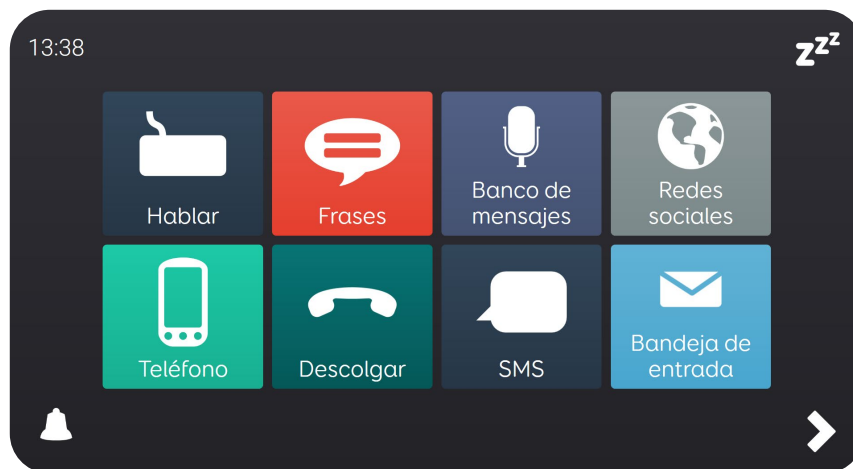

Fast Talker - Cuadrícula de Inicio 1


- | | |
|--------------------------|--|
| Hablar | El teclado del chat cuenta con potentes herramientas de predicción para ayudarte a aumentar tu ritmo de comunicación. |
| Frases | Frases y mensajes preparados para situaciones e interacciones habituales que puedes decir rápidamente sin teclearlos. |
| Banco de mensajes | Si has grabado frases y mensajes con voz, puedes almacenarlos en la cuadrícula de banco de mensajes, para utilizarlos en lugar de la síntesis de voz. Aquí también puedes grabar nuevas frases y palabras. |
| Redes sociales | Conéctate a cuentas de redes sociales como Facebook, Twitter y otras, y navega por YouTube. |
| Teléfono | Navega por tus contactos y realiza llamadas telefónicas. |
| Descolgar | Responde las llamadas entrantes desde tu dispositivo. |
| SMS | Lee y envía mensajes de texto a través de un teléfono Android conectado. |
| Bandeja de correo | Envía y recibe correos electrónicos desde tu cuenta. |



Navegación cuadrículas
Muévete entre las dos cuadrículas de Inicio de Fast Talker.



Alarmas
Alarma sonora o SMS de emergencia.

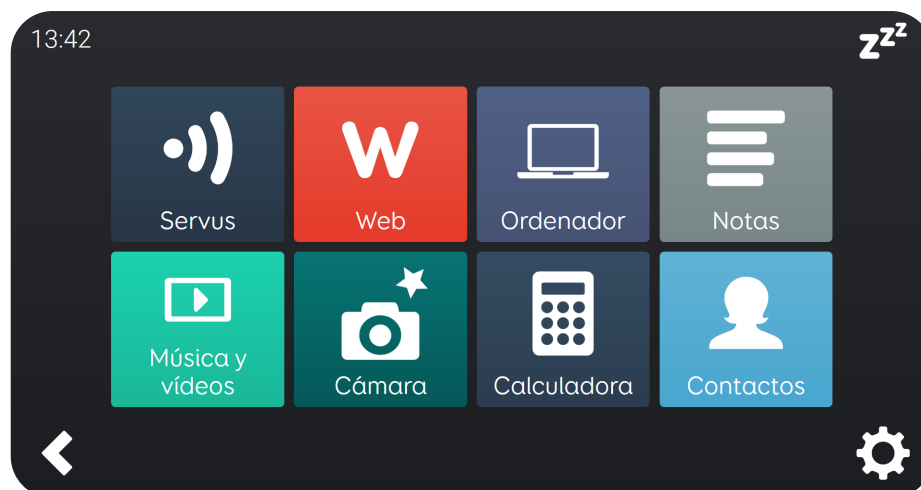


Fast Talker - Cuadrícula de Inicio 2

Servus	Utiliza el control de entorno Servus para controlar los dispositivos del hogar como televisores, equipo de música, lámparas, cortinas y mucho más.
Web	Navega en la web con el navegador accesible en Grid.
Ordenador	Accede al escritorio y a las aplicaciones de Windows a través del control del ordenador.
Notas	Utiliza la aplicación Notas para escribir notas y crear documentos más largos.
Música y vídeo	Accede a la música y los vídeos que están almacenados en tu dispositivo.
Cámara	Haz fotos con la cámara incorporada en tu dispositivo.
Calculadora	Utiliza la calculadora para hacer sumas rápidas y cálculos básicos.
Contactos	Explora, añade y elimina contactos de tu dispositivo.



Descanso

Para aquellos que utilizan la mirada o un acceso con cursor, pueden utilizar la celda de descanso para detener el método de acceso y mirar alrededor de la cuadrícula sin hacer ninguna selección.

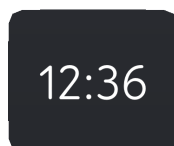

Reloj

Pulsa el reloj para comprobar la hora.




Ajustes

Calibra y controla el comportamiento de Fast Talker y Grid.

Teclado del chat

La cuadrícula de Hablar o Chat de Fast Talker se basa en un teclado QWERTY.

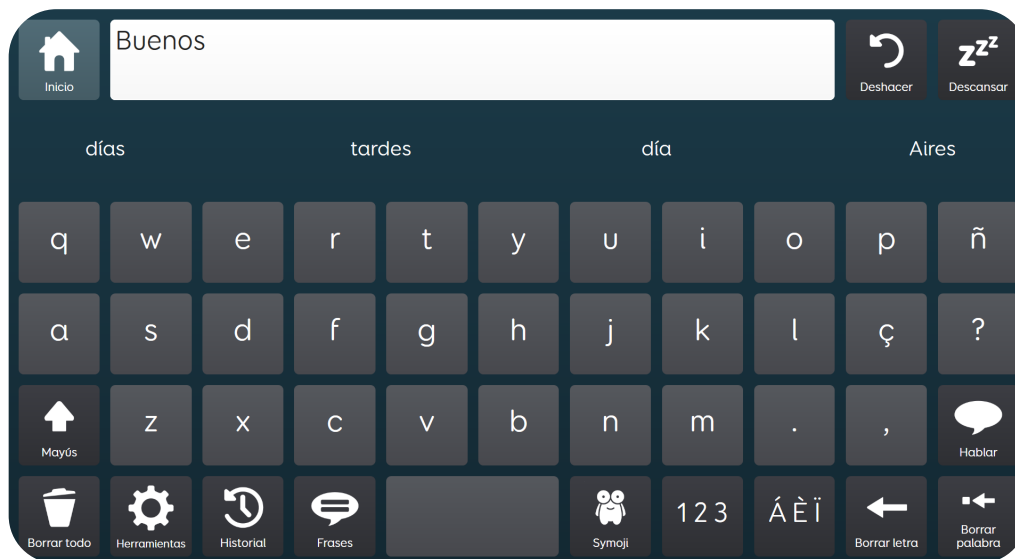

Fast Talker - Cuadrícula del Chat

Área del chat y funciones

Área del chat

En la parte superior de la cuadrícula está el área del chat, donde se crean los mensajes. Al seleccionar la celda Hablar tu mensaje se leerá en voz alta.

Deshacer

Esto deshacerá la última selección o acción de escritura que hayas hecho, así que, por ejemplo, si seleccionaste la celda de predicción equivocada, puedes deshacer y seleccionar de nuevo. También puedes utilizar deshacer para restaurar el texto en el área de escritura si seleccionaste por error Borrar todo.

Predicción de palabras

La fila de celdas bajo la barra del mensaje son tus predicciones. Solo tienes que empezar a escribir una palabra y después de unas cuantas letras deberías verla aparecer. Después de seleccionar tu palabra, aparecerán sugerencias para la siguiente palabra.

Consejo: Puedes cambiar de predicción de palabras al historial del chat utilizando la celda de Historial situada en la parte inferior del teclado. El historial del chat te sugerirá frases completas basadas en lo que ya hayas dicho.

Mayúsculas

Al pulsar una vez la tecla de Mayúsculas se pondrá en mayúscula la primera letra de la siguiente palabra; al seleccionarla de nuevo, se pondrán en mayúscula todas las letras hasta que se vuelva a seleccionar Mayúsculas.

Borrar todo, borrar palabra y borrar letra

La celda de Borrar reestablece la barra de mensajes, que queda lista para crear un nuevo mensaje. También puedes borrar tu mensaje palabra por palabra o letra por letra.

Herramientas


Abre una cuadrícula de edición de texto y funciones útiles.

Hablar

Pulsa la celda Hablar para decir tu mensaje en voz alta.

1 2 3


Muestra el teclado numérico y los signos de puntuación. A B C te llevará de nuevo al teclado.

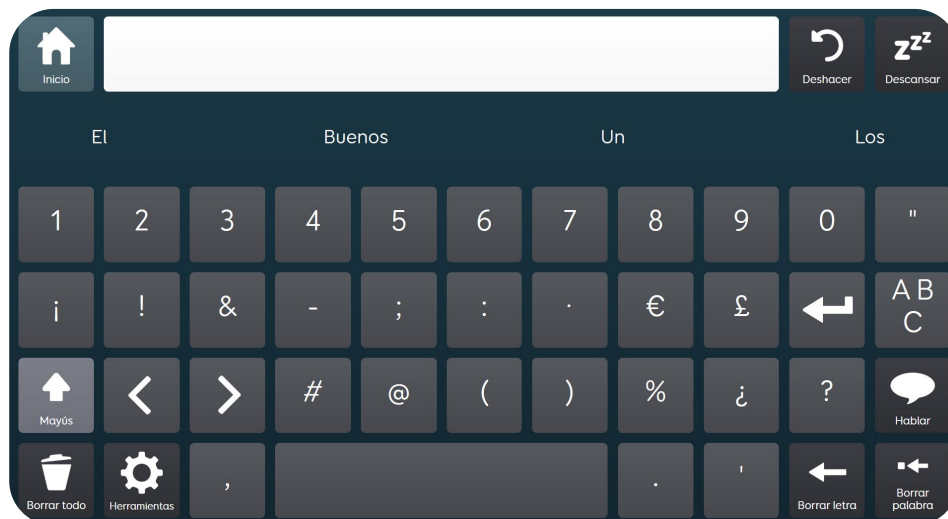

Fast Talker - Cuadrícula de chat - Números

À É Ì


Muestra el teclado con acentos y diéresis. A B C te llevará de nuevo al teclado.

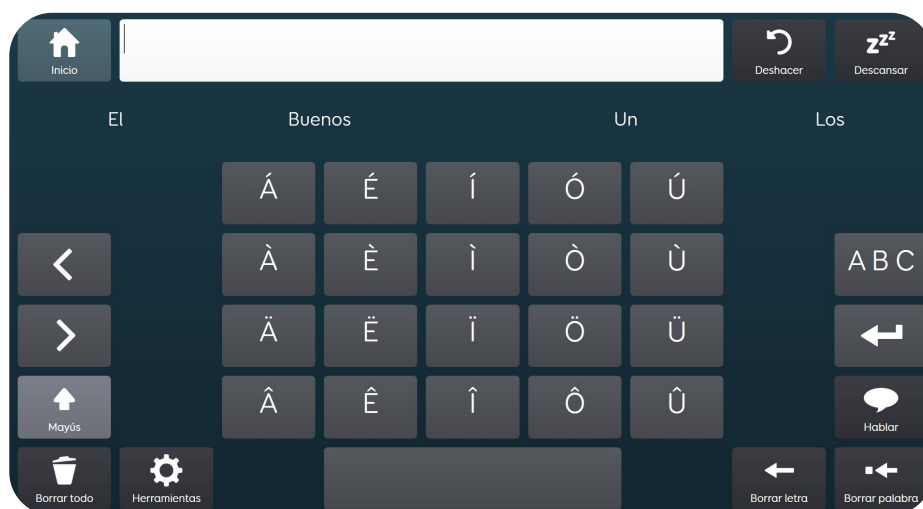


Fast Talker - Cuadrícula de chat - Acentos

Teclado de Fast Talker - Celdas grandes

El teclado del chat en Fast Talker - Celdas grandes está dividido en dos pantallas con las letras organizadas por frecuencia de uso. Las letras más utilizadas aparecen en la primera cuadrícula, y las que se usan con menos frecuencia se encuentran en una segunda cuadrícula del teclado.

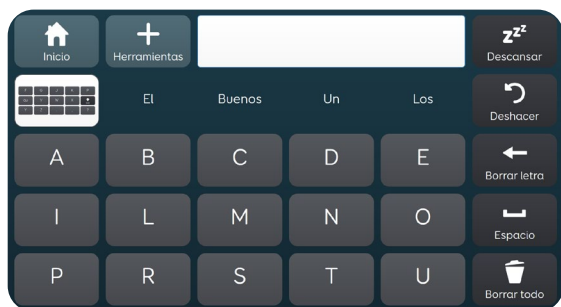

Fast Talker Celdas Grandes -
Cuadrícula Hablar

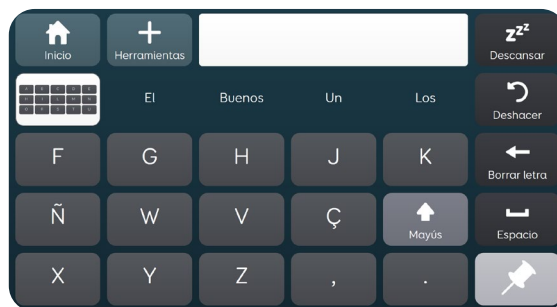

Fast Talker Celdas Grandes -
Cuadrícula Hablar - Teclado Secundario

Puedes utilizar la celda del teclado para cambiar entre los dos teclados. También encontrarás el comando Mayúscula, Volver y Fijar en el segundo teclado.

Fijar

El segundo teclado saltará automáticamente a la cuadrícula de inicio una vez que hayas seleccionado una letra. Puedes seleccionar la celda Fijar para permanecer en la segunda cuadrícula y elegir otra letra después de hacer tu primera selección.


Herramientas

En Fast Talker - Celdas grandes, la predicción y la visualización del historial del chat, el teclado de signos de puntuación y la palabra Eliminar se encuentran en Herramientas, junto con una selección de funciones útiles para editar el texto y crear mensajes más largos.

Consejo: Fast Talker - Celdas grandes no tiene una celda para Hablar. En vez de esto, puedes seleccionar el área del chat para decir tu mensaje en voz alta.

Herramientas del chat

Encontrarás una selección de funciones útiles en la cuadrícula de Herramientas de Fast Talker y de Fast Talker - Celdas grandes.

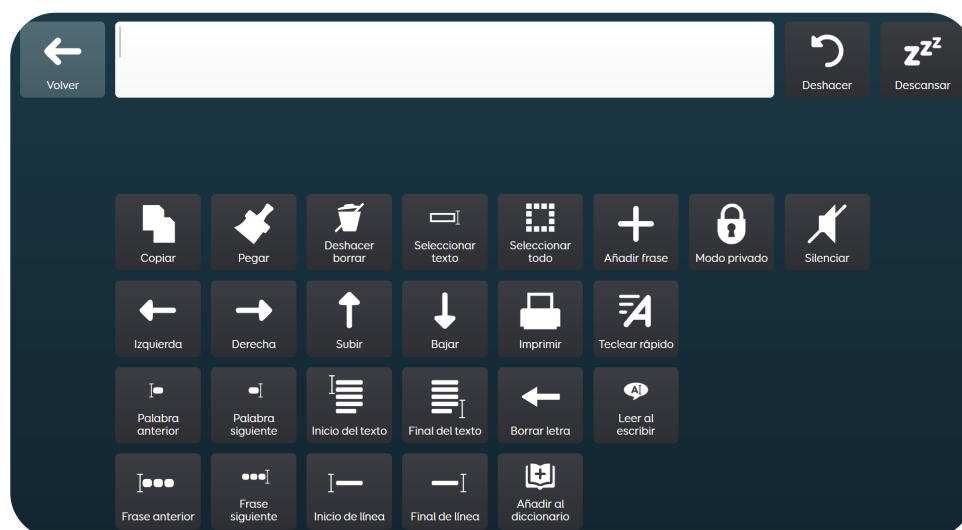

Fast Talker - Cuadrícula hablar - Herramientas

Copiar y Pegar

Copiar hará una copia de toda la zona del área del chat y Pegar insertará lo copiado.

Consejo: Cuando pegues un texto, este aparecerá donde sea que se encuentre el cursor en el área del chat. Puedes mover el cursor con las flechas o con los comandos de la palabra anterior y siguiente.

Deshacer borrar todo - Solo Fast Talker

Deshacer Borrar todo restablecerá el texto en el área del chat desde la última vez que seleccionaste Borrar todo.

Seleccionar texto

Si quieres seleccionar un texto y copiarlo en un correo electrónico o en otro programa, puedes utilizar la celda de Seleccionar texto. Esto te permitirá seleccionar texto del área del chat utilizando las teclas de flechas. Una vez que hayas seleccionado el texto, puedes desactivar la celda de seleccionar texto y copiar el texto resaltado.

Seleccionar todo – Solo Fast Talker

Seleccionar todo seleccionará todo en el área del chat.

Añadir frase

Añadir frase tomará el texto del área del chat y lo añadirá a la aplicación de Mensajes.

Modo privado

Activa y desactiva el modo privado para controlar cuando recuerda Fast Talker lo que dices.

Imprimir

Al seleccionar Imprimir se generará un PDF del texto del área del chat y se enviará a una impresora conectada.

Escritura rápida

Activa la función de escritura rápida para acelerar la velocidad de las letras y los números de tu teclado. Como están en lugares conocidos, puedes seleccionarnos rápidamente y aumentar tu velocidad de comunicación.

Palabra anterior y siguiente

Palabra anterior y Palabra siguiente moverán el cursor entre las palabras del área del chat.

Inicio y Fin del texto

Inicio y Fin del texto moverán el cursor al inicio o al final del texto en el área del chat.

Frase anterior y Frase siguiente – Solo Fast Talker


Frase anterior y Frase siguiente moverán el cursor a la frase anterior o a la siguiente. Esto te será útil si estás editando párrafos de texto.

Inicio y Fin de línea – Solo Fast Talker

Inicio y Fin de línea moverán el cursor al inicio o al final de la línea en la que estés en el área del chat.

Historial del chat

El historial del chat te ofrece una forma rápida y sencilla de decir frases enteras. Con tu permiso, todo lo que digas se guardará.

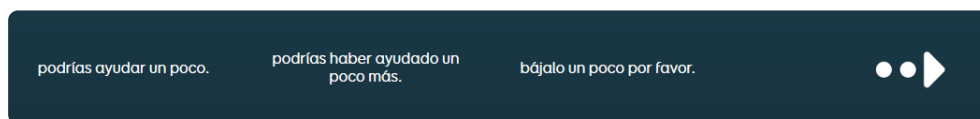

Fast Talker - Barra del historial del chat

Las sugerencias del historial del chat aparecerán en la misma fila que la predicción de palabras bajo el área del chat. Puedes pasar de la predicción al historial del chat utilizando la celda del historial del chat en la parte inferior del teclado. Lo encontrarás en Herramientas en Fast Talker Celdas grandes.

¿Cómo funciona el historial del chat?

Las frases de tu historial del chat se surgen en función de la frecuencia con las que las dices y de lo reciente que se dijeron. El historial del chat también tiene en cuenta dónde estabas cuando dijiste algo por última vez.


Por ejemplo, las frases que aparecen cuando estás en tu cafetería favorita pueden ser distintas de las que aparecen cuando estás en casa. Si la frase que quieres utilizar no aparece de inmediato, utiliza la celda Más para ver más opciones.

Consejo: En lugar de empezar por el principio de la frase, empieza a escribir la palabra clave y los mensajes relacionados aparecerán bajo la barra de mensajes. Por ejemplo, si quieres pedir un café, solo tienes que escribir “café”.

Fast Talker incluye un enorme banco de frases habituales para que puedas empezar.

¡Tus propias frases personales se añaden a medida que las dices!

Puedes activar el historial del chat en **Configuración - Escritura - Historial del chat**.

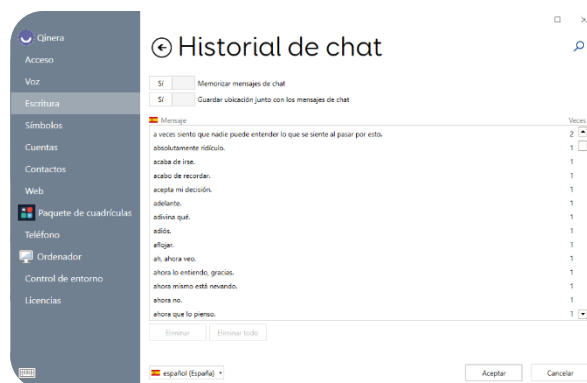


Configuración - Escritura - Historial del Chat

Eliminar una frase del Historial del chat

Si quieres eliminar una frase del historial del chat, empieza por escribir la palabra clave para que el mensaje que deseas eliminar aparezca debajo del área del chat.

Después, selecciona la flecha para obtener más sugerencias y verás todos los mensajes relacionados que están almacenados en el historial del chat. Ahora puedes seleccionar **Eliminar** y elegir la frase que quieres borrar.

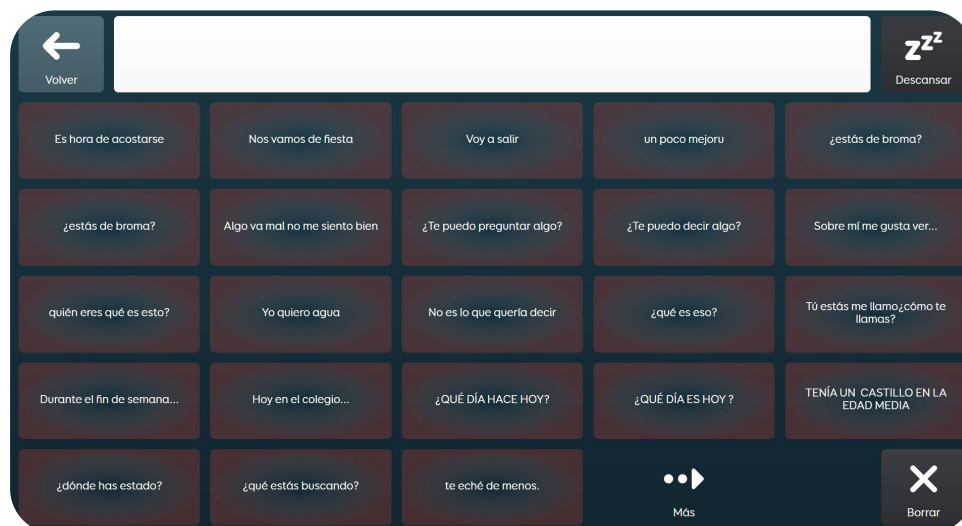


Fast Talker Celdas grandes – Cuadrícula del Chat – Eliminar el historial del chat


Consejo: En Fast Talker Celdas grandes tendrás que ir a Herramientas y seleccionar el historial del chat para que aparezca la barra.

Modo Privado

Puede haber ocasiones en las que no quieras que el programa Grid recuerde lo que quieres decir. En estas ocasiones, simplemente puedes activar el modo privado seleccionando el candado en Herramientas. El candado cambiará de color cuando el modo privado esté activado y no se almacenará ninguna frase en el historial del chat hasta que lo desactives de nuevo o salgas de Fast Talker.

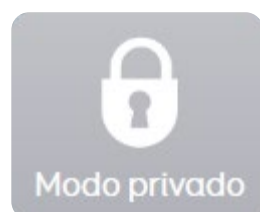

Modo privado ON

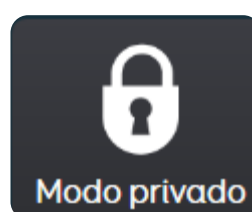


Modo privado OFF

Mensajes

Fast Talker viene con una serie de frases ya almacenadas, organizadas en categorías. Cada frase sonará en cuanto se seleccione.

Estos mensajes son para ayudarte a responder rápidamente en situaciones específicas e interacciones comunes y son completamente editables.

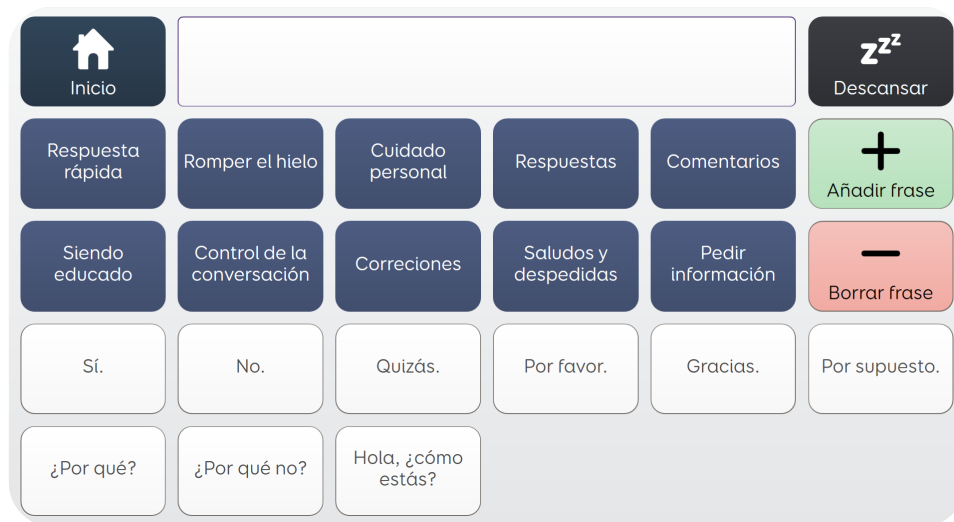

Fast Talker Celdas grandes - Cuadrícula de mensajes

Añadir y eliminar frases

Puedes añadir y eliminar tus propios mensajes utilizando las opciones Añadir frase y Borrar frase.

Para añadir una nueva frase, primero tienes que escribirla utilizando el teclado del chat. A continuación, ve a Herramientas y selecciona Añadir frase. Esto te llevará a la cuadrícula de Mensajes y podrás elegir en qué categoría quieres guardar tu frase.


Ahora puedes elegir la celda en la que quieres que aparezca tu frase. Las celdas disponibles estarán resaltadas en verde. Puedes elegir sobrescribir un mensaje anterior o seleccionar una celda en blanco para añadir tu mensaje al final de la lista.

Del mismo modo, puedes eliminar una frase seleccionando Eliminar y luego eligiendo la frase que ya no quieres.

Consejo: Si quieres cambiar el nombre de tus categorías, puedes hacerlo en el modo edición. Solo tienes que elegir la categoría que quieres editar y pulsar el botón Cambiar etiqueta en la barra de herramientas.

Banco de mensajes

El banco de mensajes te permite reproducir las frases que has grabado con tu propia voz, en lugar de utilizar una voz sintetizada.

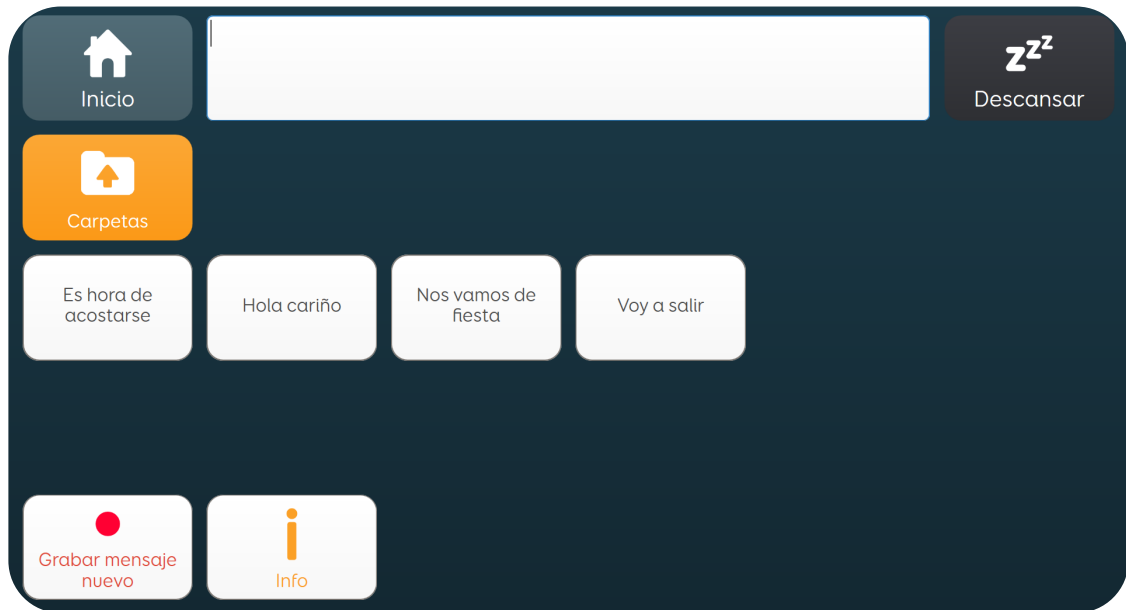

Fast Talker Celdas grandes - Banco de mensajes

Consejo: Los mensajes almacenados también pueden activarse escribiendo la frase con el teclado o seleccionándola del tu historial del chat.

Añadir frases

Para añadir una frase selecciona **Grabar mensaje nuevo** y utiliza el teclado para escribir la frase que quieres grabar. Selecciona **Siguiente** cuando estés satisfecho con tu frase y utiliza el botón **Iniciar/Detener** grabación para grabar tu mensaje.


Ahora puedes comprobar si estás satisfecho con tu grabación y, a continuación, Guardar y Finalizar o elegir **Grabar de nuevo**.

Si quieres grabar varios mensajes, solo tienes que elegir **Guardar y grabar una nueva frase** para volver al teclado y crear el siguiente mensaje.

Consejo: También puedes grabar, importar, borrar y organizar tus mensajes en categorías yendo a **Configuración - Voz - Banco de mensajes**.

Redes sociales y web apps


La cuadrícula de las redes sociales y web apps ofrecen versiones más accesibles de YouTube, Facebook, Twitter y otras aplicaciones.

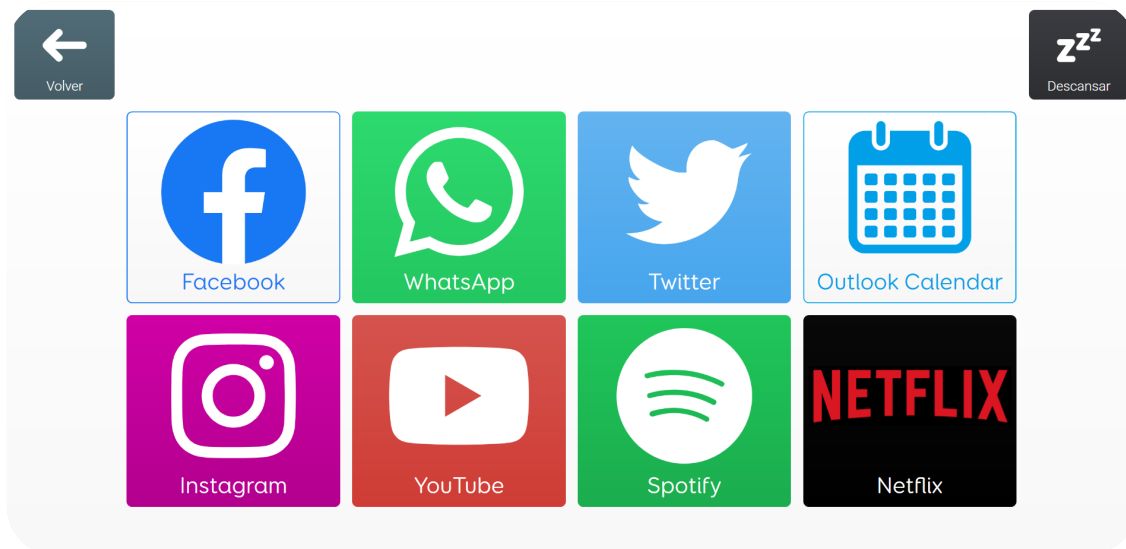

Fast Talker - Cuadrícula de Web apps

YouTube

La cuadrícula de YouTube se abrirá en el modo TV de YouTube. Utiliza las flechas de navegación para moverte entre los vídeos y el menú. Cuando un vídeo esté marcado, selecciona **Reproducir/Seleccionar** para empezar a verlo. Si tienes una opción del menú seleccionada, la celda **Reproducir/Seleccionar** activará ese elemento.

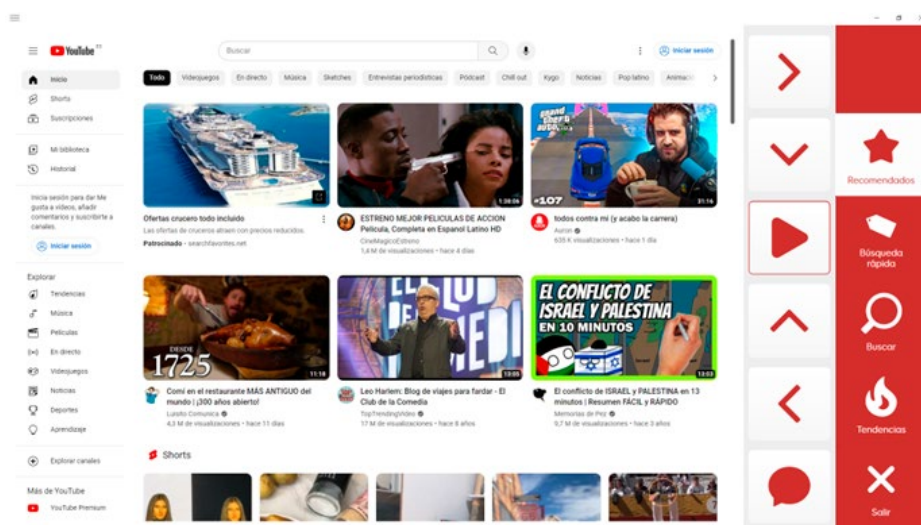


Fast Talker - Cuadrícula de YouTube

Cuando quieras Volver a la pantalla de navegación, pulsa **Salir**.

Búsqueda


La búsqueda abrirá una cuadrícula del teclado que puedes utilizar para buscar los vídeos. Escribe tu búsqueda y selecciona **Buscar** para buscar en YouTube. Utiliza las teclas de las flechas para navegar entre los resultados de la búsqueda y pulsa **Reproducir/Seleccionar** cuando hayas encontrado el vídeo que quieres ver. Si seleccionas **Cancelar**, volverás a los resultados de la búsqueda.

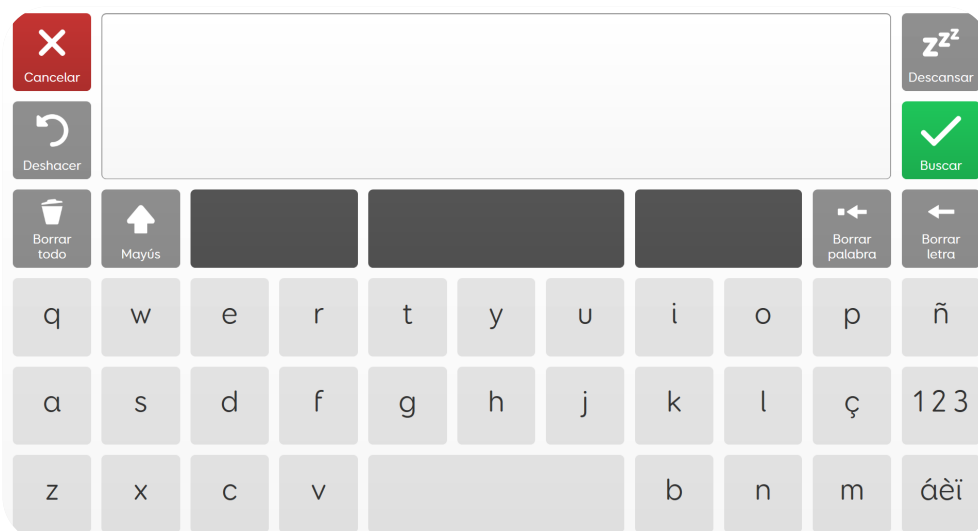

Fast Talker - YouTube - Cuadrícula de Búsqueda

Iniciar sesión en YouTube

Es posible que quieras iniciar sesión en YouTube si quieres acceder a tus propias suscripciones y listas de reproducción. Para acceder, tendrás que crear una cuenta de Google. También necesitarás un navegador web independiente abierto en tu dispositivo o en un teléfono móvil. En tu dispositivo, ve a la opción de Inicio de sesión en YouTube.

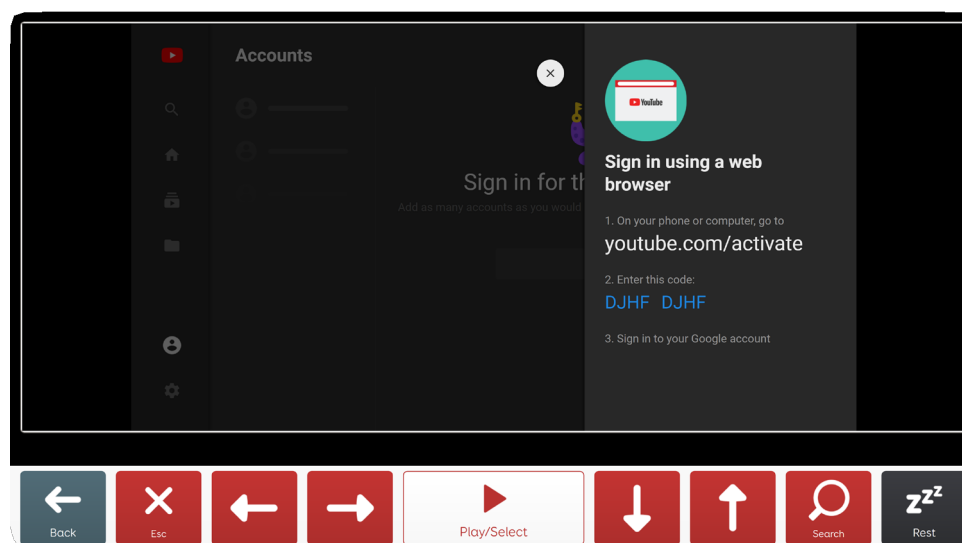

Fast Talker - Cuadrícula de YouTube


En la segunda ventana del navegador o dispositivo móvil ve a **Youtube.com/Activate** y escribe el código de inicio de sesión que aparece en el paquete de cuadrículas.

Sigue las instrucciones de tu dispositivo móvil o de tu segundo navegador para confirmar tu cuenta.

Consejo: De vez en cuando Google y YouTube actualizan sus métodos de inicio de sesión; en caso de duda, lee la pantalla y sigue las instrucciones de Google. Siempre intentamos mantener nuestros paquetes de cuadrículas actualizados con los últimos cambios.

Facebook

La cuadrícula de Facebook te da acceso al Timeline, mensajes y más.

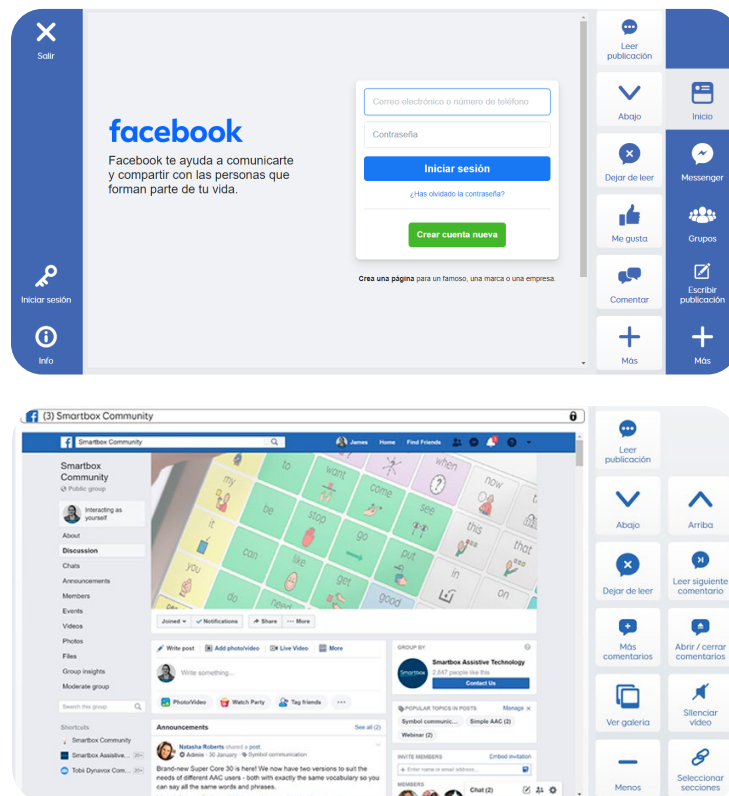

Fast Talker - Cuadrícula de Facebook

Iniciar sesión en Facebook

Pulsa la celda de **Inicio de sesión** para acceder a tu cuenta de Facebook. Tendrás que introducir tu correo electrónico o tu número de teléfono en una cuadrícula de teclado que aparecerá. Selecciona el enlace Siguiendo para pasar a la pestaña de la contraseña.

Consejo: Es posible que aparezca la página "Recordar este navegador". Lo mejor es seleccionar "Sí". Utiliza las opciones de navegación para seleccionar el enlace.

Moverse por Facebook

Para desplazarte hacia arriba y hacia abajo en el Timeline, utiliza las celdas Arriba y Abajo.

Estado

Para escribir un estado en tu propio feed selecciona la celda de Escribir publicación. Se abrirá una cuadrícula de teclado en la que podrás escribir tu mensaje. Cuando hayas acabado, selecciona Confirmar.

Si empiezas a escribir un mensaje y quieres volver al feed sin publicarlo, selecciona **Volver**. En Fast Talker Celdas grandes puedes hacer esto seleccionando **Herramientas**, seguido de **Facebook - Inicio**

Comentarios y Me gusta

Si tienes una historia destacada puedes añadir un comentario pulsando **Comentar**. Se abrirá un teclado en el que podrás añadir tu mensaje y, a continuación, selecciona **Confirmar** para añadir tu mensaje a la conversación.

Para “darle me gusta” a una historia destacada, selecciona la celda “**Me gusta**”. ¡Siempre puedes volver a pulsar “Me gusta” después!

Notificaciones


Para revisar tus notificaciones selecciona la celda Notificaciones, esto abrirá tus notificaciones en una nueva ventana. Puedes navegar en las notificaciones con las celdas de arriba y abajo y activar la celda de enlace.

Mensajes

Al seleccionar **Messenger** se abre Facebook Messenger, aquí puedes enviar mensajes privados a tus amigos. Utiliza **Mensaje anterior** y **Mensaje siguiente** para desplazarte por tus conversaciones. Desplazarte hacia arriba y hacia abajo te permitirá navegar por la ventana de los mensajes. Si seleccionas **Escribir**, podrás escribir tu mensaje.

Twitter

Inicia sesión en Twitter para redactar tuits, enviar mensajes, retuitear y utilizar hashtags.

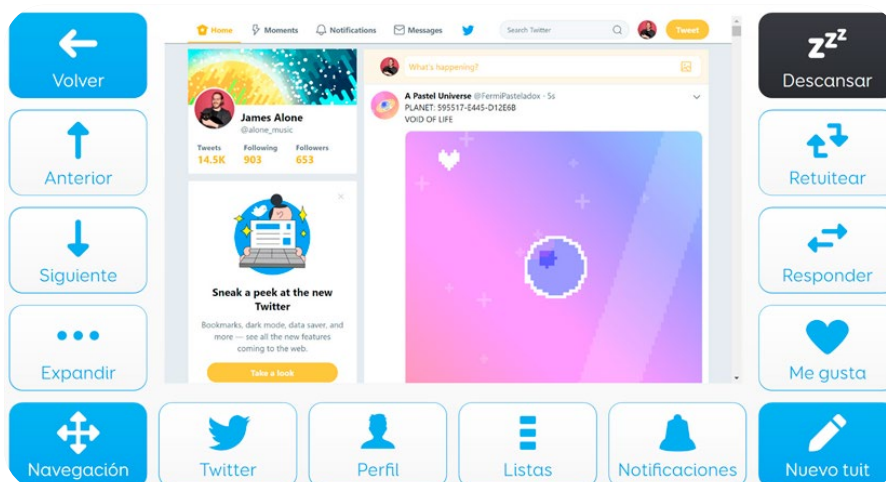


Fast Talker Celdas grandes - Cuadrícula de Twitter

Navega por el Timeline

Utiliza las celdas de **Anterior** y **Siguiente** para navegar por tu cronología o timeline. Puedes **Responder** y **Retuitear** cualquier publicación seleccionando las celdas correspondientes. Puedes obtener un control más preciso de tu navegación seleccionando **Navegación**. En la cuadrícula de navegación puedes **ampliar** y **reducir** tu cronología y navegar entre los enlaces de los tuits.

Tuitear

Selecciona **Nuevo tuit** para abrir tu teclado para escribir tu mensaje. Cuando hayas terminado de escribir, pulsa Tuit para publicar tu mensaje.

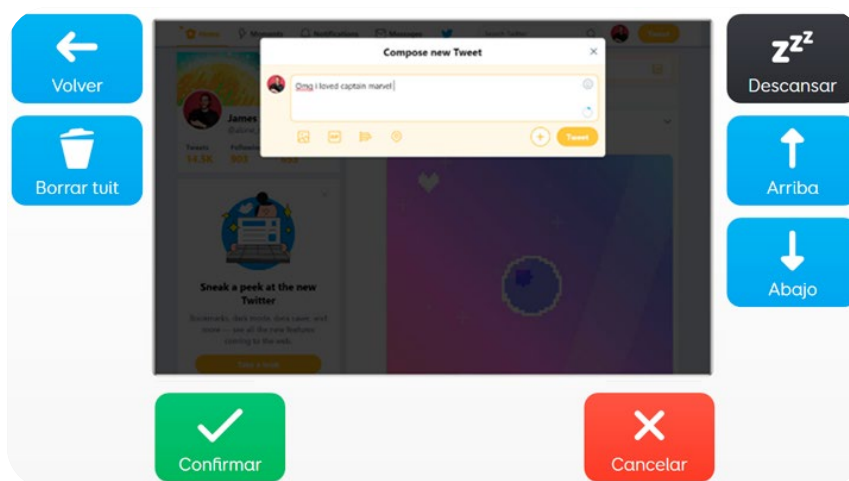

Fast Talker Celdas grandes - Twitter - Nuevo Tuit

Consejo: Cuando escribas tu mensaje, ten en cuenta que debe mantenerse dentro del límite de 280 caracteres de Twitter (¡incluidos los espacios!)

Responder, Retuitear y Me Gusta

Cuando respondas a un Tuit, se abrirá la cuadrícula del teclado para que escribas tu mensaje. No verás el nombre del usuario al que estás respondiendo mientras escribes tu respuesta. Cuando hayas terminado selecciona **Tuit** y tendrás que confirmar tu respuesta antes de enviarla.

Retuitear reenviará el tuit resaltado a tu cronología.

Me gusta le dará a un tuit tu sello de aprobación que todo el mundo puede ver.

Ver tu perfil

Perfil te llevará a tu perfil personal donde podrás ver tus tuits anteriores.

Teléfono

Accede a tus contactos y realiza llamadas telefónicas con un teléfono Android.

Conectar un teléfono Android a Grid 3

Antes de poder realizar cualquier llamada con Fast Talker, deberás conectar tu teléfono. Necesitarás:

- Un teléfono Android compatible con acceso a Google Play Store y Bluetooth
- La aplicación Remote Phone Call.
- El Software CallCenter para PC.
- Tu dispositivo de comunicación debe ser compatible y tener acceso a la configuración del Bluetooth.

Consejo: Es importante que pruebes la aplicación Remote Phone Call y CallCenter en tu dispositivo antes de comprarla.

Paso 1: Emparejar el teléfono con el dispositivo

Ve a los ajustes de Bluetooth de tu teléfono y asegúrate que el Bluetooth está activado y es visible. En tu dispositivo abre el **Panel de control** y luego **Dispositivos**. Haz clic en **"Añadir dispositivo Bluetooth"** y verás que aparece tu teléfono. Selecciona tu teléfono y haz clic en **Siguiente** para emparejarlo y sigue las instrucciones en pantalla para ambos dispositivos.

Paso 2: Instalar el software

Primero ve a la página web en tu teléfono y selecciona **Remote Phone Call trial** y sigue el enlace de la tienda para instalar la aplicación. También puedes encontrar la aplicación buscando en Play Store "Remote Phone Call".

Para instalar el software en tu dispositivo de comunicación, abre un navegador web (no en Grid 3) y ve a www.justremotephone.com. Baja hasta la sección de descargar y selecciona **CallCenter.msi**. Una vez descargado, instala el software.

Paso 3: Conecta tu teléfono y el dispositivo de ayuda a la comunicación

Con la aplicación en tu teléfono y el software CallCenter instalado, ambos dispositivos están listos para ser emparejados.


Abre CallCenter en tu dispositivo de comunicación seleccionando el icono en el Escritorio (también lo encontrarás en el menú de Inicio). Se abrirá el software. Verás un menú desplegable, selecciónalo y deberías ver el nombre de tu teléfono con un icono verde de Android.

Abre Grid 3 y ve a **Configuración**

Selecciona **Teléfono**. Aparecerá una ventana emergente con Grid 3 solicitando acceso a CallCenter.

Selecciona **Acceso**. Marca la casilla "Recordar esta respuesta" para evitar que aparezca la ventana emergente cada vez que se abra Grid 3. A continuación, puedes minimizar CallCenter y seleccionar **Aceptar** en la pantalla de configuración. Grid 3 está ahora vinculado a tu teléfono. ¡Es posible que aparezcan varias notificaciones con tus llamadas y mensajes!

La cuadrícula del Teléfono

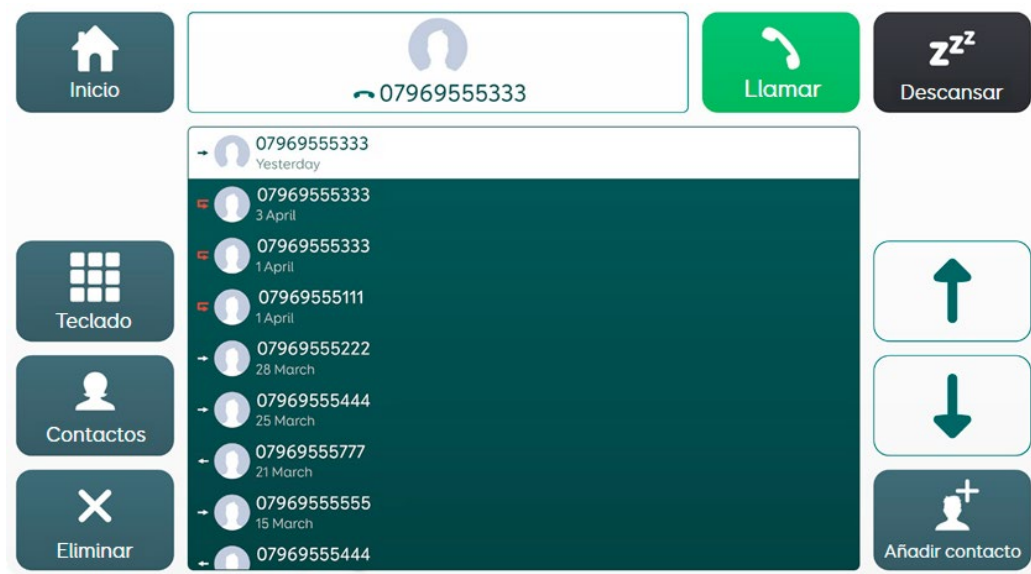

Fast Talker Celdas grandes - Teléfono - Inicio

La cuadrícula de Teléfono muestra una lista de tus llamadas más recientes por la que puedes navegar con las celdas de la flecha. Al seleccionar **Llamar** se llamará al contacto resaltado.

Consejo: Si un contacto no está en tu teléfono, puedes seleccionar la celda **Añadir Contacto** para empezar a añadir los detalles pertinentes.


¿Por qué mis contactos de Grid 3 no son los mismos que los de mi teléfono?

Tu teléfono y Grid 3 tienen dos listas de contactos distintas. Grid 3 mostrará los nombres que tu teléfono conoce. Para agregarlos a Grid 3, tienes que resaltar el contacto y seleccionar **Añadir Contacto**. Si añades un contacto que tu teléfono conoce, el campo del nombre ya estará completo.



Fast Talker Celdas grandes - Teléfono - Añadir contacto


Contactos enumera todos los contactos de Grid 3 que has añadido. Puedes seleccionar un contacto y enviar un SMS, un correo electrónico o realizar una llamada. También puedes editar o eliminar contactos de esta cuadrícula.

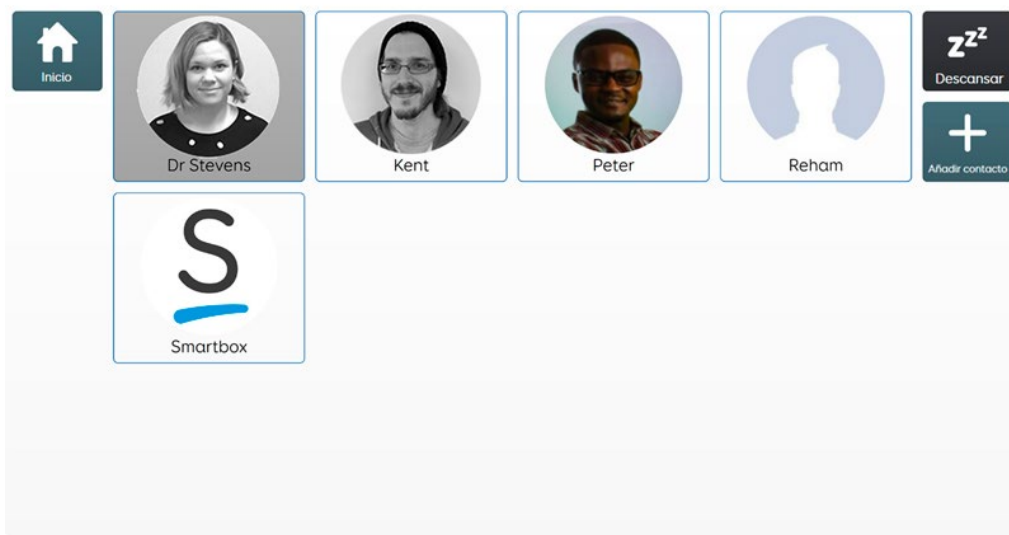

Fast Talker - Inicio - Contactos

Responder

Al abrir la cuadrícula **Responder**, se responderá automáticamente a una llamada entrante. Si abres la cuadrícula después de que la persona que llama haya colgado, puedes ir a la cuadrícula de marcación o a la de tu teléfono.

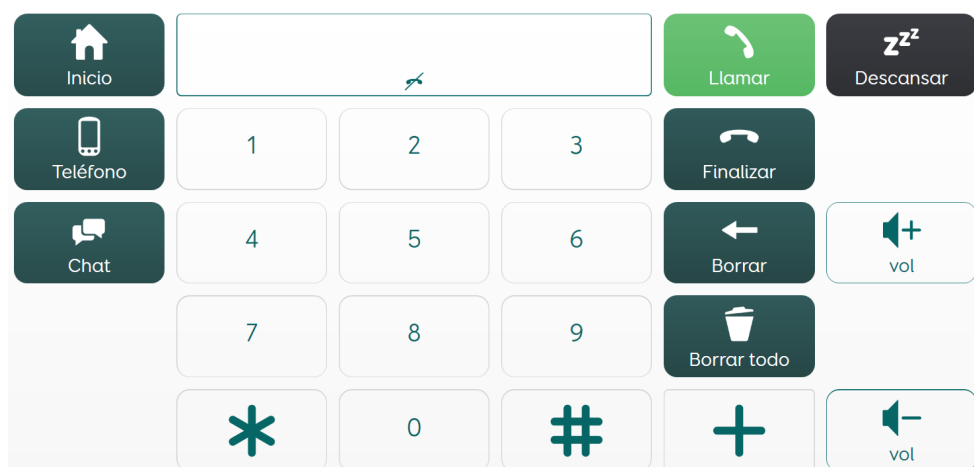

Fast Talker Celdas grandes - Responder

Mensaje de texto

Al abrir la cuadrícula de Mensaje de texto, aparecerá una lista de tus mensajes de texto extraídos de tu teléfono. Puedes utilizar las teclas de las flechas para navegar por la lista y la celda Hablar leerá en voz alta el nombre o número del contacto, seguido de la fecha en que se recibió el mensaje.



Fast Talker - Mensaje de texto - Abrir mensaje

La celda **Abrir** abrirá toda la conversación. Al seleccionar **Hablar** en la cuadrícula de la conversación se leerá el último mensaje recibido.



Fast Talker - Mensaje de Texto - Enviar mensaje

Puedes contestar, avanzar o borrar un mensaje. También puedes escribir un Nuevo mensaje de texto.

Consejo: Tendrás que añadir un contacto antes de empezar un nuevo mensaje. Puedes hacerlo utilizando la cuadrícula de contactos.

Correo electrónico

Con Fast Talker puedes conectarte a tu cuenta de correo electrónico y redactar y enviar mensajes. Antes de poder utilizar la cuadrícula de correo electrónico, necesitarás configurar tu cuenta.


Configurar tu cuenta de Correo Electrónico en Grid 3

La configuración de tu cuenta de correo electrónico puede variar en función de tu proveedor de correo electrónico. Estas instrucciones abarcan la mayoría de los ajustes, pero es posible que tengas que consultar nuestra guía online.

Abre **Configuración - Cuentas - Correo electrónico**

En el menú desplegable selecciona tu proveedor de correo electrónico. Si tu proveedor no aparece en la lista, selecciona **IMAP y SMTP**.

Tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico y tu contraseña.

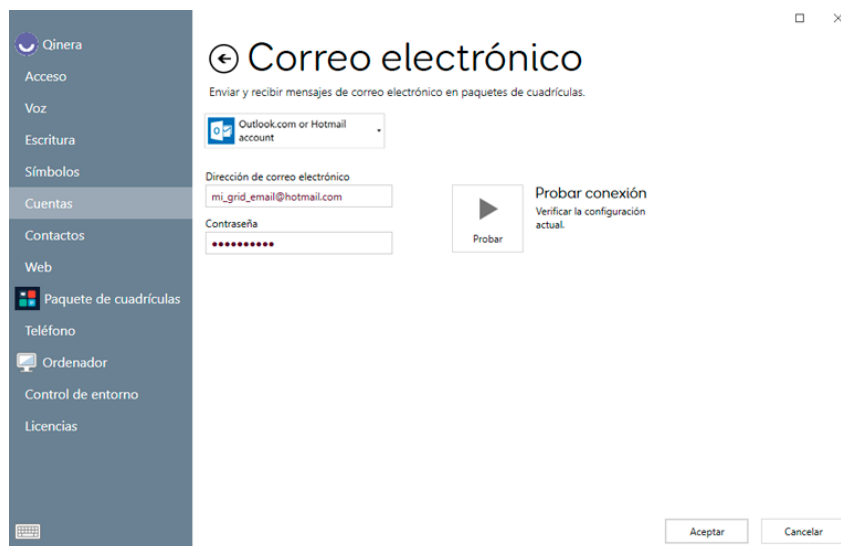

Gmail and Yahoo

Si utilizas Gmail o Yahoo, tendrás que configurar tu cuenta para permitir a Grid 3 conectarse. Inicia sesión en tu cuenta en un navegador web y busca la configuración de la cuenta.

En Gmail, busca la opción "**Permitir accesos menos seguros a la aplicación**" en la configuración de tu cuenta.

Si tienes una dirección de correo electrónico de Yahoo tendrás que configurar una contraseña concreta para la cuenta. Para más información sobre cómo hacerlo, visita:


thinksmartbox.com/answer/email-account-settings-in-grid-3

Una vez que Grid 3 tiene acceso a tu cuenta, vuelve a Grid 3 y selecciona **Probar conexión**. Si todo va bien verás "Conexión exitosa".

Consejo: Dependiendo de la cantidad de correos electrónicos que tengas actualmente en tu bandeja de entrada, Grid 3 tardará algún tiempo en importar los mensajes.

Usar el Correo electrónico

Utiliza las celdas de las flechas para moverte en tu bandeja de entrada. Aquí puedes enviar correos electrónicos a tus contactos o a direcciones de correo electrónico que conozcas.

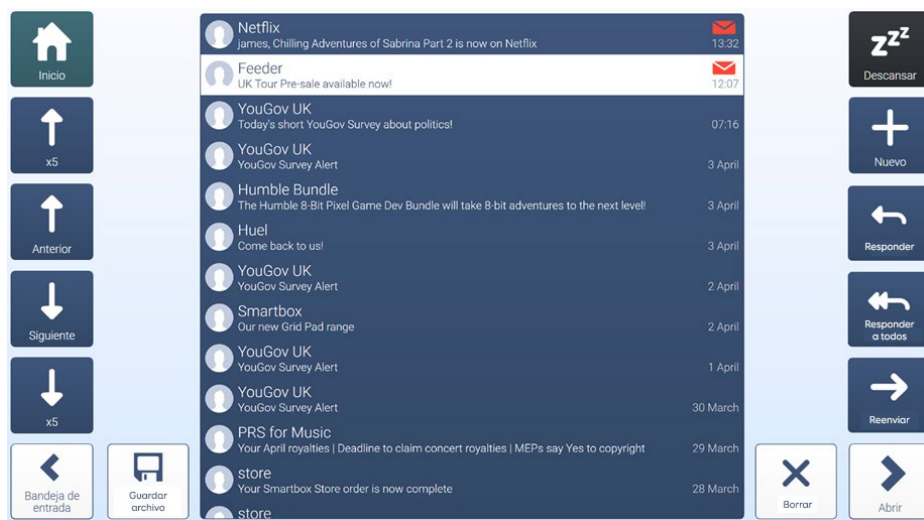

Fast Talker - Correo electrónico


Al seleccionar **Responder** y **Responder a todos** todo crearás un nuevo correo electrónico con la conversación(es) resaltada(s).

Reenviar te permitirá enviar un correo electrónico a uno de tus contactos.

Cuando elijas **Abrir** podrás leer toda la cadena de correos.

Nuevos Correos electrónicos

Selecciona **Nuevo** y elije un contacto. Ten en cuenta que tendrás que añadir la dirección de correo electrónico a tus contactos antes de empezar a escribir un correo electrónico.

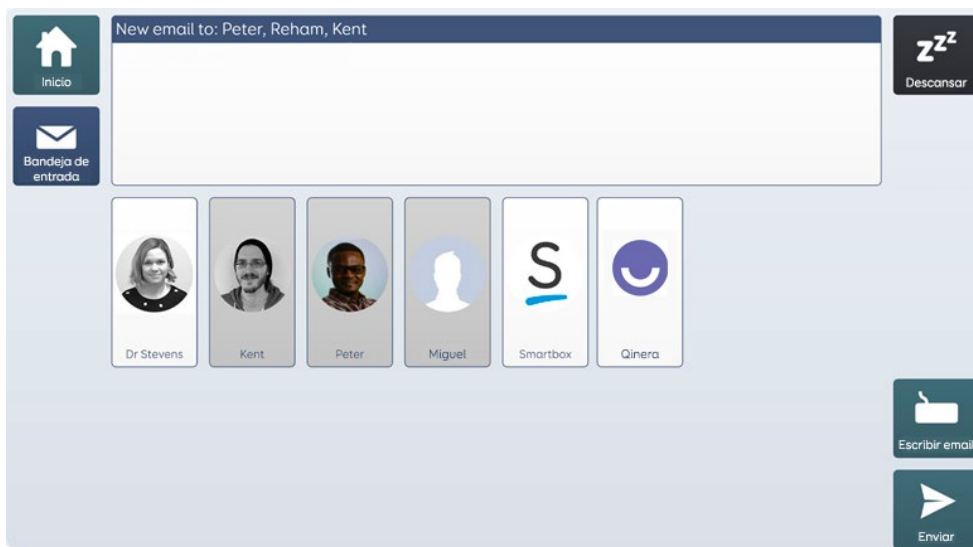

Con el contacto seleccionado puedes escribir tu correo electrónico pulsando **Escribir Correo electrónico**. Escribe tu correo electrónico y envíalo seleccionando la celda Enviar. Si estás utilizando Fast Talker Celdas grandes, la celda de envío se encuentra en Funciones.

Consejo: También puedes enviar el correo electrónico a más de una persona seleccionado varios contactos.

Archivos adjuntos

Si hay una imagen adjunta a un correo electrónico, puedes guardarla en tu dispositivo pulsado guardar adjunto.

Los archivos adjuntos se guardan en tu galería de imágenes (que también puedes encontrar en Mis imágenes en Windows)

Cuando estas redactando un correo electrónico, puedes adjuntar una imagen seleccionando Herramientas y Adjuntar foto. Esto abre tu biblioteca de imágenes y te permite examinar y seleccionar una foto. Ten en cuenta que solo puedes seleccionar una foto por correo electrónico.



Fast Talker - Adjuntar foto

Control de entorno Servus

Fast Talker puede controlar una serie de dispositivos para darte más autonomía. Con la tecnología de infrarrojos puedes controlar el televisor, los decodificadores y otros dispositivos de la casa. También puedes utilizar un transmisor de radiofrecuencia para controlar las luces, las puertas, las ventanas y mucho más.

Para utilizar estas cuadrículas, necesitarás un dispositivo compatible (por ejemplo, un Grid Pad) con soporte para la transmisión por infrarrojos y radiofrecuencia.

Para obtener más información sobre lo que admite el hardware, consulta el manual y sus especificaciones.



Fast Talker - Servus

Configuración de control de entorno Servus y Fast Talker

Para utilizar las cuadrículas de control de entorno Fast Talker, deberás configurar tus accesorios y mandos a distancia para que funcionen con Grid 3 y tu dispositivo.

Mandos por infrarrojos

Las cuadrículas de control de entorno Servus están preparadas para una gran variedad de dispositivos y electrodomésticos. Tendrás que enseñar a Grid Pad los códigos infrarrojos correctos.

Tenemos una lista de diferentes códigos infrarrojos para muchos dispositivos de entretenimiento domésticos. Antes de empezar a configurar los dispositivos, comprueba la lista para ver si tenemos los códigos pertinentes preprogramados para ahorrarte tiempo. Estos archivos están almacenados como **.remote** files. Para encontrar la lista actual de archivos **.remote** visita:

thinksmartbox.com/ir-remotes

Instalación de un archivo .remote

Para instalar un archivo .remote, descarga el archivo que necesitas de nuestro sitio web, cierra Grid 3 y abre tu **Explorador de archivos**.

Ve a: **Usuarios\Público\Documentos\Smartbox\Grid 3\Environment Control Accessories**

Copia el archivo .remote en esta carpeta y abre Grid 3.

Ve a **Configuración - Control de entorno** en Grid 3 y ahora verás el nuevo dispositivo en la lista.

Configurar manualmente un mando a distancia por infrarrojos

Para configurar un mando manualmente, abre Grid 3 y ve a **Configuración, Control de entorno**. En **Elementos**, selecciona **Añadir**.



Configuración - Control de entorno - Añadir

Verás una lista de elementos. Selecciona el tipo de elemento que quieres configurar y pasarás a la pantalla de aprendizaje.



Configuración - Control de entorno - Añadir - Televisión

Aquí puedes nombrar tus dispositivos (esto es útil si vas a utilizar más de un dispositivo del mismo tipo), cambiar el icono y lo más importante, aprender las señales IR.

Selecciona el botón de **Acción** que quieres entrenar, por ejemplo, Encendido, luego pulsa el botón **Aprender** en la parte derecha de la ventana.

Aparecerá la ventana Aprender infrarrojos y te pedirá seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Recuerda apuntar con tu mando directamente al receptor de infrarrojos.


Una vez completado, el botón de Acción se pondrá en verde. Ahora puedes probarlo pulsando Transmitir. Sigue estos pasos para cada botón de Acción correspondiente que aparezca en tu mando a distancia, luego haz clic en Aceptar para guardar y volver a la ventana de control de entorno Servus.

Configuración de un dispositivo de radiofrecuencia

Para utilizar un dispositivo de radiofrecuencia EasyWave o Z-Wave, primero tienes que emparejarlo con tu Grid Pad y luego configurar su comportamiento. En el siguiente ejemplo estamos utilizando un receptor EasyWave, sin embargo, se utilizan instrucciones similares para los dispositivos Z-Wave.

Emparejar un receptor EasyWave

Ve a **Configuración**, **Control de entorno** y selecciona Mandos. Resalta EasyWave y pulsa **Configurar**.

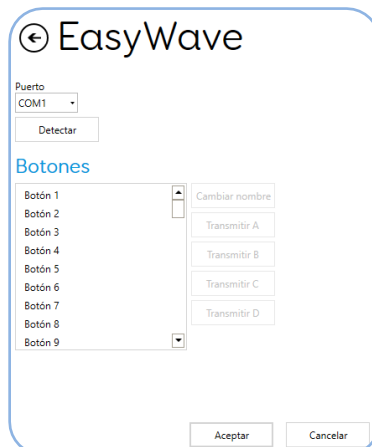

Configuración - Control de entorno - Mandos - EasyWave

Tendrás que asignar un botón al receptor. Selecciona uno de los botones del menú y haz clic en **Renombrar**. Esto te será de utilidad si vas a utilizar más de un receptor. Asígnale al botón un nombre reconocible y pulsa Intro.

Conecta el receptor EasyWave a una toma de corriente y pulsa el botón una vez para entrar en el modo de entrenamiento. El LED parpadeará en un patrón constante.

En Grid 3, selecciona el botón con el nuevo nombre y pulsa **Transmitir A**. En tu receptor EasyWave, pulsa el botón tres veces. Esto hará que el dispositivo vuelva al modo de funcionamiento. Ahora puedes tocar **Transmitir A** para encender el conmutador y **Transmitir B** para apagarlo.

Añadir el receptor emparejado a un Elemento


Una vez emparejado el receptor, puedes asignarlo a un elemento y utilizarlo en los paquetes de cuadrículas de Control de entorno Servus. En **Configuración, Control de entorno**, pulsa **Añadir** en el apartado de Elementos.



Configuración - Control de entorno - Añadir elemento

En la ventana de Añadir elemento, selecciona **Receptor** y pulsa **Siguiente**.

Ahora puedes ponerle un nombre al elemento. Esto es de utilidad si estás utilizando más de un elemento al mismo tiempo. En este ejemplo, el receptor controla un ventilador.

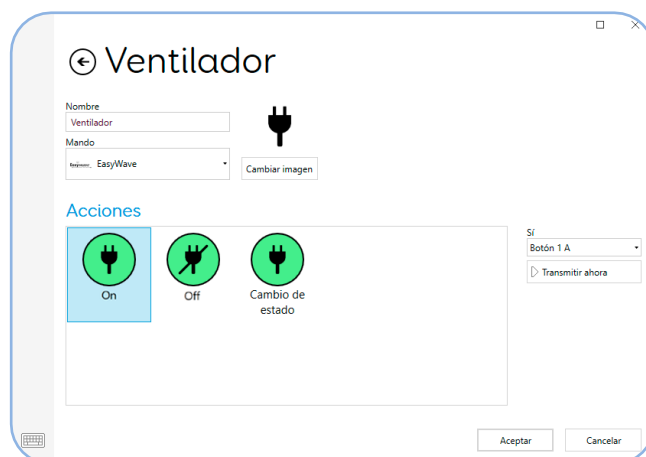


Configuración - Control de entorno - Añadir elemento - Receptor

En las acciones, pulsa **On** y elige el nombre de tu botón en el menú desplegable. A continuación, selecciona la acción **Off** y asígnale el nombre de tu botón, seguido de la letra B. Selecciona **Aceptar** para guardar la configuración y vuelve a la ventana de Control de entorno.

El receptor aparecerá ahora en la lista de accesorios y estará listo para ser utilizado en el paquete de cuadrículas de Control de entorno Servus.

Navegador Web


El navegador web Fast Talker te permite acceder a Internet y navegar por contenidos con fáciles controles de acceso.

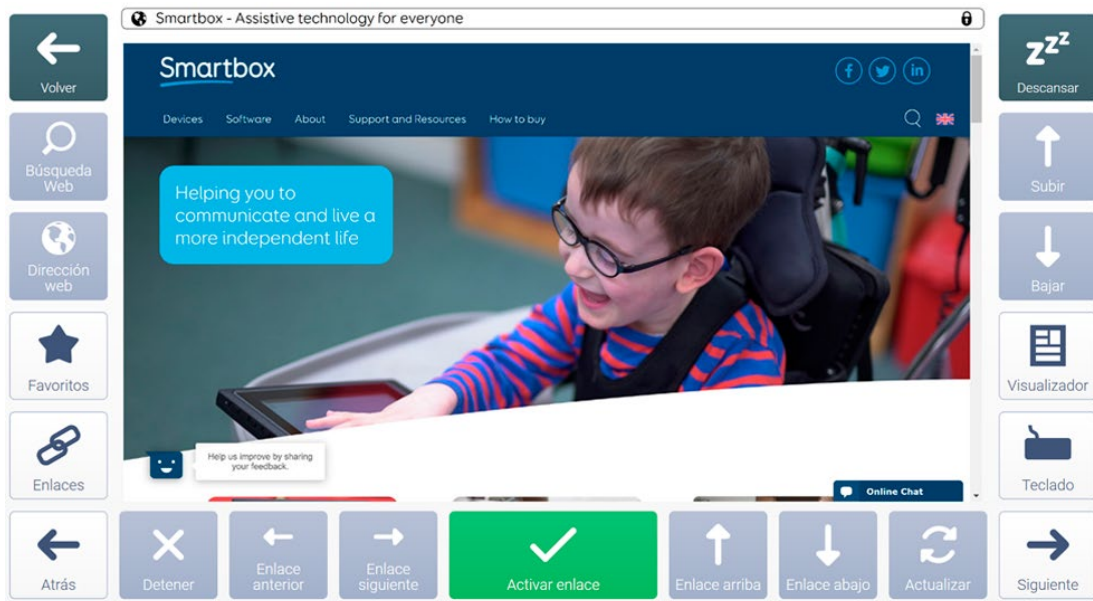

Fast Talker - Web

Búsqueda web

Al seleccionar **Búsqueda web** se abre el teclado donde puedes introducir los términos de búsqueda. Al seleccionar **Ir** se inicia la búsqueda y se muestran los resultados.

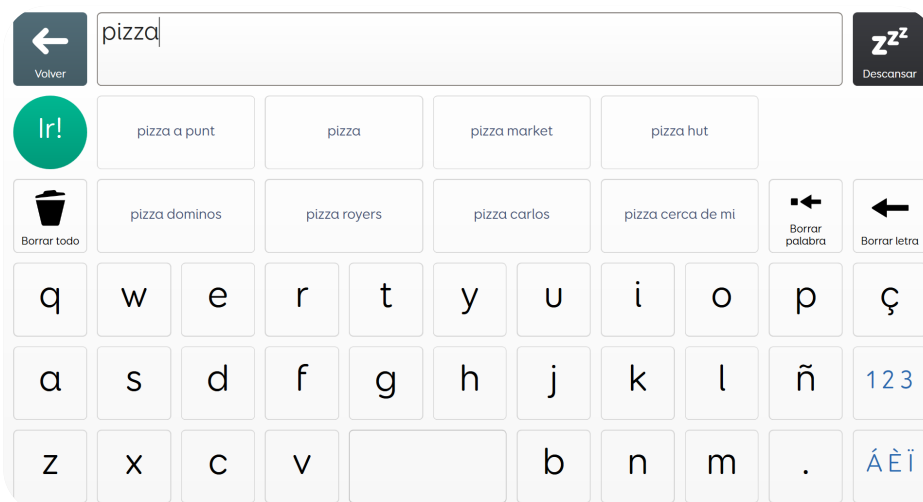

Fast Talker - Web - Búsqueda web

Dirección web

Al seleccionar **Dirección web**, se abrirá el teclado (con **www.** ya añadido para mayor comodidad). Aquí puedes escribir el resto de la dirección web que quieres visitar y pulsar **Ir**.

Navegar en una página web

Fast Talker tiene varias opciones para facilitar la lectura de las páginas web. Puedes utilizar las celdas de **Desplazar hacia arriba** y **Desplazar hacia abajo** para mover la página hacia arriba y hacia abajo, las celdas de **Desplazar a la izquierda** y **Desplazar a la derecha** controlan el desplazamiento horizontal.

Al seleccionar **Navegación** se abren más opciones. Aquí puedes acercarte y alejarte de la página que estás viendo y navegar por los enlaces de la página. También puedes acceder al teclado para insertar texto.

Hay varias opciones de **Vista** disponible. Al seleccionar Vista, la ventana del navegador se amplía para ocupar más espacio en la pantalla y proporcionando un control más preciso del desplazamiento. Puedes acercar y alejar el zoom y entrar en el **Modo lectura**.



Fast Talker - Web - Vista - Modo lectura

El **Modo lectura** elimina el formato del sitio web que estás viendo y lo muestra solo como texto. Esto puede ayudar a centrarse en el texto más pequeño y hacer que los artículos más largos sean más fáciles de leer.

También puedes elegir cargar la **Versión móvil**. Esto recarga el sitio web en su vista móvil, que a menudo es un diseño más simple con más enfoque en el contenido. Puedes revertir esta acción seleccionando **Versión móvil** de nuevo.

La celda de **Favoritos** abre una cuadrícula con los sitios que has añadido a favoritos. Puedes seleccionar **Añadir a favoritos** para añadir el sitio en el que te encuentres a tu lista de favoritos.

Si pulsas **Eliminar favorito**, podrás seleccionar un favorito y eliminarlo de la lista.

Consejo: Si llenas la cuadrícula de favoritos, ¡no te preocupes! Aparecerá automáticamente una nueva celda para añadir la nueva cuadrícula.

Control del ordenador


El control del ordenador en Fast Talker está diseñado para los usuarios que acceden a su dispositivo con el cursor o con la mirada. Con Control del ordenador tienes acceso a las aplicaciones de Windows, con una superposición de control que te permite hacer clic, arrastrar, escribir y mucho más.

Utilizar el Control del ordenador

El control del ordenador sirve para navegar por la interfaz de Windows y utilizar aplicaciones como Word o Excel.

Con el control del ordenador puedes seleccionar el tipo de clic que quieres utilizar, luego guiar el puntero o la mirada hacia el punto en el que se debe hacer clic, y luego permitir que se realice la pausa o el clic.

Consejo: Si vas a hacer varios clics, por ejemplo, si estás jugando, puedes seleccionar la celda de clic dos veces. Esto significa que este clic configurado siempre ocurrirá hasta que pulses la celda de clic de nuevo para desactivar el comando.

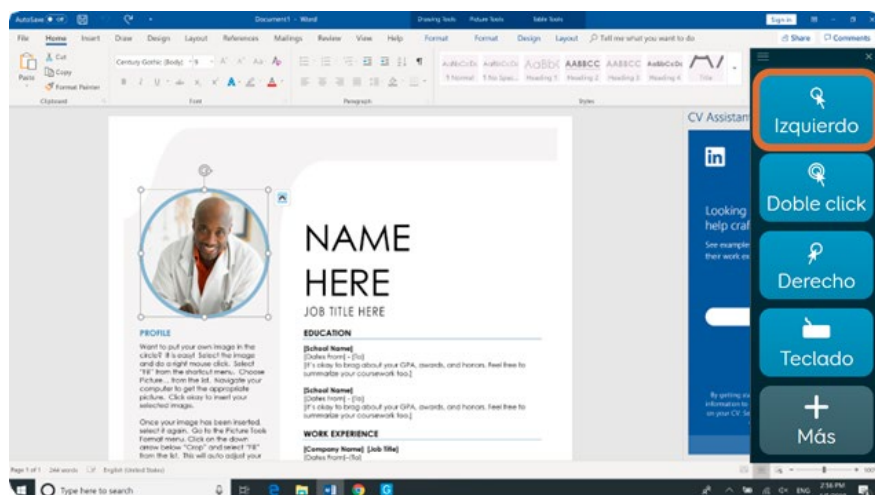

Fast Talker Celdas grandes - Control del ordenador

Configuración de Acceso

Para configurar el control del ordenador, tendrás que configurar los ajustes de Acceso para que se adapten a tus necesidades. En Configuración, Acceso, puedes elegir entre configurar el control por puntero o el control por mirada. Si estás utilizando el control por puntero, selecciónalo y aparecerá en pantalla la configuración del Control del ordenador.

Opciones del puntero

Pulsa el conmutador para hacer clic

Con Pulsar conmutador para hacer clic puedes mover el cursor por la pantalla y pulsar el conmutador para hacer una selección. Tendrías que haber conectado un conmutador a tu dispositivo y haberlo configurado en **Configuración, Acceso, Conmutador**.

Clic por espera

Mueve el cursor del ratón por la pantalla con la mirada y cuando esté quieto empezará el clic por espera.

Clic por zoom

El Clic por zoom te permite centrarte en una parte de la pantalla con un zoom lento, para que puedas señalar exactamente dónde quieres interactuar con la pantalla. Puedes ajustar la velocidad y el nivel de aumento.



Opciones de seguimiento de mirada

Mueve el puntero, sin clic

Mover el cursor del ratón simplemente permite guiar el cursor del ratón por la pantalla sin hacer clic.

Mueve el puntero, conmutador para hacer clic

Con Pulsar conmutador para hacer clic utilizas la cámara de seguimiento de mirada para mover el cursor por la pantalla, para hacer una selección pulsa el conmutador. Necesitarás haber conectado un conmutador a tu Grid Pad y haberlo configurado en Configuración, Acceso, Conmutador.

Mueve el puntero, parpadea para hacer clic

El parpadeo para hacer clic utiliza la cámara de mirada para mover el cursor por la pantalla y al parpadear harás tus selecciones. Puedes ajustar los tiempos de parpadeo mínimo y máximo para evitar activaciones accidentales.

Mueve el puntero, clic por espera

Mueve el cursor del ratón por la pantalla con la mirada y cuando esté quieto empezará una pausa.

Mover y clic por espera

La opción de Mover y clic por espera te permite mover el ratón por la pantalla con la mirada. Cuando esté quieto, aparecerá el temporizador de permanencia. De esta forma, no verás el cursor del ratón en la pantalla.

Zoom para moverte y hacer clic

El Clic por zoom te permite centrarte en una parte de la pantalla con un zoom lento, para que puedas señalar exactamente dónde quieres interactuar con la pantalla. Puedes ajustar la velocidad y el nivel de aumento.

Control del ordenador con Fast Talker

Cuando se abre el Control del ordenador, Grid 3 se encoge, y se reduce a la derecha de la pantalla con opciones para elegir el tipo de clic que desees y para utilizar un teclado accesible en la pantalla.

Al seleccionar **Más**, obtendrás más opciones de clic, así como **Herramientas**. La celda **Vista** te ofrece opciones para reposicionar tu cuadrícula de Control del ordenador.

En la cuadrícula de Herramientas puedes ajustar tus preferencias de acceso y también hacer la cuadrícula de Control del ordenador más grande o pequeña. Seleccionando **Más** obtendrás más opciones para cambiar entre los programas del escritorio.


La celda de **Inicio** te llevará de nuevo a la cuadrícula de Inicio de Fast Talker, que volverá a ser de pantalla completa.

Teclados

La cuadrícula del teclado en el Control del ordenador te permite ver el programa en el que estás escribiendo, sin embargo, si estás utilizando las Fast Talker Celdas grandes también podrás hacer que el teclado esté en pantalla completa para un acceso más fácil.


Notas

La cuadrícula de Notas te permite crear documentos más largos dentro de Fast Talker que puedes imprimir o copiar en correos electrónicos, mensajes y más.

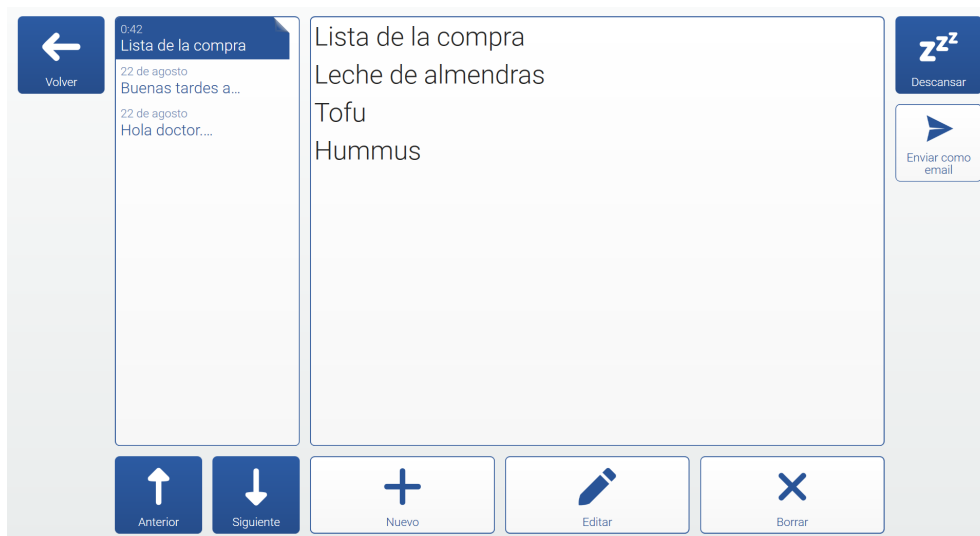

Fast Talker - Notas

En la cuadrícula de Inicio de Notas encontrarás una lista de tus notas guardadas, opciones para editar la nota seleccionada, crear una **nueva** nota y **eliminar** la nota seleccionada. También verás una vista previa de la nota seleccionada.

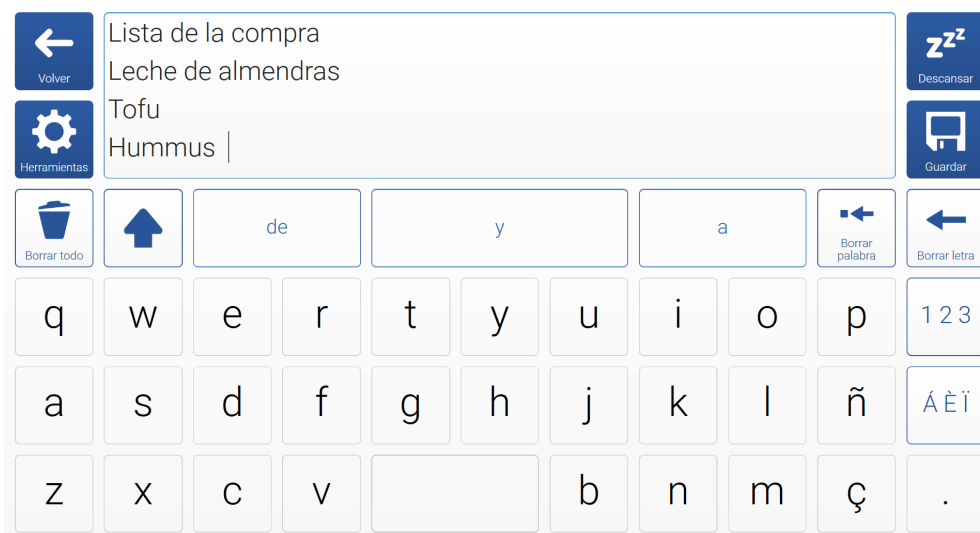

Fast Talker - Notes - Editor

Al seleccionar **Editar**, se abrirá el teclado y podrás seguir escribiendo un mensaje más largo. **Nuevo** abrirá tu teclado y un espacio de trabajo en blanco. Para guardar el documento y volver a la cuadrícula de Notas selecciona **Herramientas** y selecciona **Documentos**.

La cuadrícula de herramientas también te permite navegar por tus notas, copiar y pegar texto, y también puede leer en voz alta párrafos completos, lo que te permite dar discursos más largos.


Enviar como correo electrónico copiará el texto completo de la nota seleccionada y te permitirá seleccionar el contacto al que quieres enviárselo por correo electrónico. Estos mensajes se envían en el cuerpo del correo electrónico, no como archivos adjuntos separados.

Música y vídeo

Escucha música y ve vídeos en Fast Talker con la cuadrícula de Música y vídeo. La cuadrícula de Inicio te mostrará lo que se está reproduciendo y las opciones para ir a tus bibliotecas de música y vídeo.

¿Cómo añadir música?


Para cargar tu música en Fast Talker necesitarás tener tu biblioteca de música almacenada en el Reproductor de Windows Media. Para añadir música a tu biblioteca, abre el Reproductor de Windows Media, selecciona tus archivos de música, arrástralos y suéltalos en la biblioteca. Verás que la música aparece en la biblioteca, así como la información relevante, como el álbum y el artista.

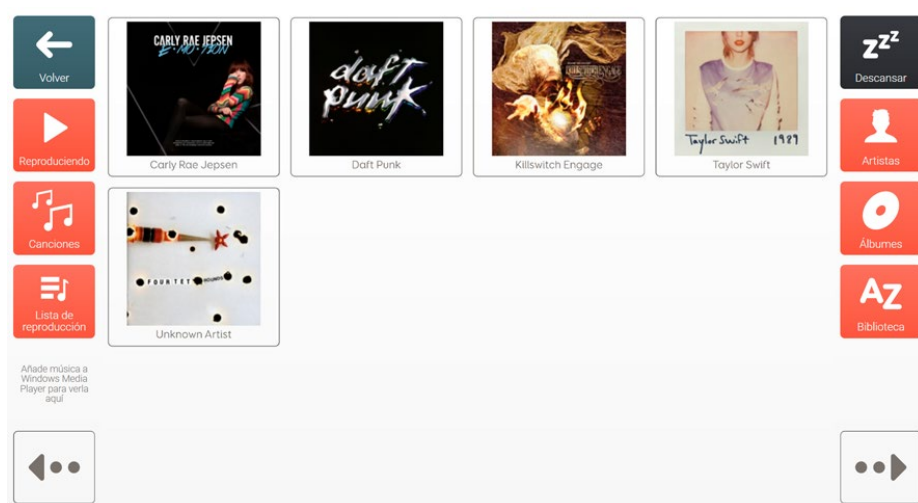

Fast Talker - Música

Reproducir música en Fast Talker

Al seleccionar Música se abrirá tu biblioteca musical, ordenada por artista. En esta cuadrícula puedes seleccionar el artista que quieres escuchar. A continuación, podrás elegir entre los álbumes que tengas, y luego la canción. También puedes buscar por Álbum o Canción.

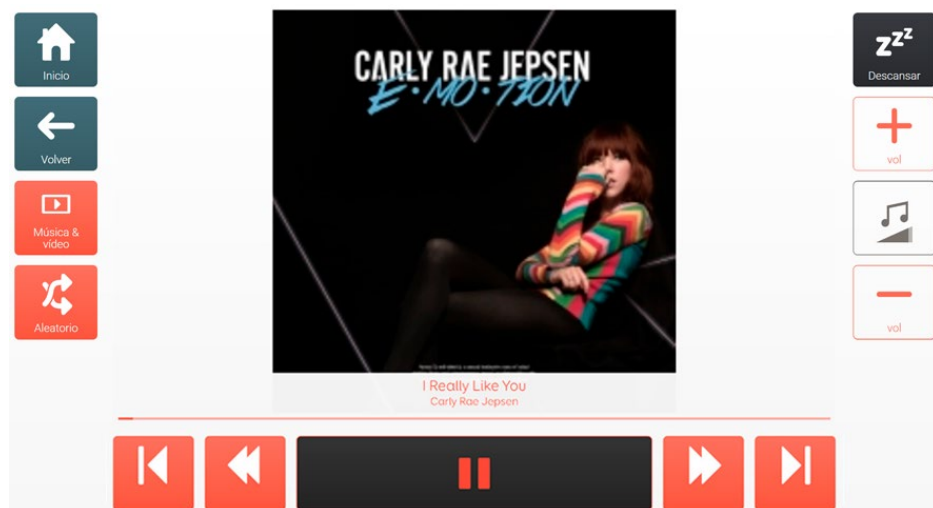

Fast Talker - Música - Reproductor

Una vez que una canción se está reproduciendo, verás la carátula de esta y una cuadrícula en la que puedes reproducir, pausar, adelantar, saltar, retroceder, mezclar tu lista de reproducción y modificar el volumen. Cuando una canción se está reproduciendo, seguirá reproduciéndose mientras navegas por otras cuadrículas.


¿Cómo añadir vídeos?

Fast Talker y Grid pueden reproducir vídeos en formato MP4. Los vídeos que quieras ver tienes que añadirlos a tus carpetas de documentos de Windows para poder reproducirlos en Fast Talker. Arrastra y suelta tus archivos de vídeo a la carpeta **Este PC - Vídeos**. Puede crear carpetas adicionales aquí dentro si necesitas organizar tus vídeos.

Ver un video en Fast Talker

Al seleccionar un vídeo de la cuadrícula de Inicio de Música y vídeo, se abrirá la biblioteca de vídeos. Puedes seleccionar un vídeo o navegar por las carpetas de contenido de vídeo que tengas en tu dispositivo. Cuando selecciones un vídeo, pasarás a la cuadrícula del reproductor de vídeo. Puedes reproducir, pausar y saltar. También puedes ajustar el volumen de la reproducción del vídeo, así como volver a tu biblioteca de vídeos.

Si sales de la cuadrícula mientras se está reproduciendo un vídeo, éste seguirá reproduciéndose en segundo plano, hasta que vuelvas a la cuadrícula de vídeo y pauses o detengas el vídeo.

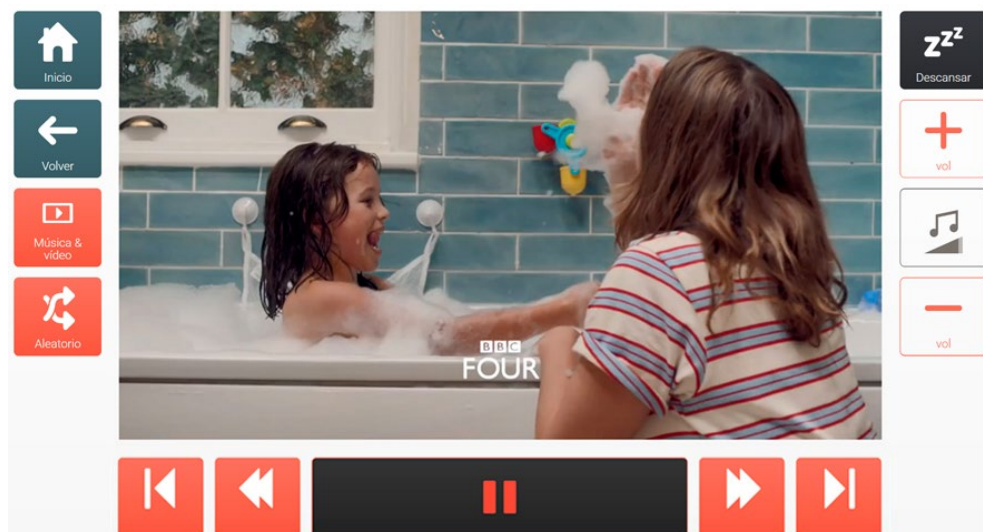

Fast Talker - Vídeo - Reproducir

Cámara

La cuadrícula de Cámara te permite hacer fotos en Fast Talker con cualquier cámara conectada a tu dispositivo.

Configuración de las cámaras

Si tu dispositivo tiene cámaras incorporadas, es posible que tengas que configurar Grid 3 para que se muestren. En **Configuración, Ordenador** encontrarás el apartado **Dispositivos**. Aquí puedes utilizar los cuadros desplegable para elegir tus cámaras frontales y traseras.

Consejo: Puedes conectar varias webcams por USB a tu dispositivo y Grid 3 debería admitirlas. Si conectas una webcam, deja que Windows detecte la cámara, reinicia Grid 3 y la cámara debería estar disponible cuando elijas las cámaras en la configuración de Grid 3.

Hacer fotos en Fast Talker

Al abrir la cuadrícula de la cámara, se mostrará una imagen en directo de la cámara seleccionada. Al seleccionar **Hacer foto** se capturará una imagen y se guardará en tu biblioteca.



Fast Talker - Cámara

La celda de Cámara cambiará entre las cámaras frontal y trasera de tu dispositivo (si están disponibles).

Si quieres navegar y ver las fotos que has hecho, selecciona **Fotos de la cámara**. Aquí verás tus fotos organizadas en una biblioteca. Puedes ir a tu carpeta **Mis imágenes** para ver otras fotos guardadas en tu biblioteca (archivos adjuntos de correo electrónico, por ejemplo).

Calculadora

La cuadrícula de la calculadora te permite realizar cálculos básicos. Utiliza el teclado para introducir dígitos.


La celda **Borrar todo** borrará todo el cálculo, la opción **Eliminar** eliminará el último dígito introducido. Puedes **sumar, restar, multiplicar y dividir**.



Fast Talker Celdas grandes - Calculadora

Contactos


La cuadrícula de contactos te permite gestionar los contactos que has guardado en Fast Talker y Grid 3. Cuando seleccionas un contacto de la lista, puedes elegir enviar un mensaje de texto, llamar, enviar un correo electrónico o editar contacto. También puedes elegir eliminar contacto.

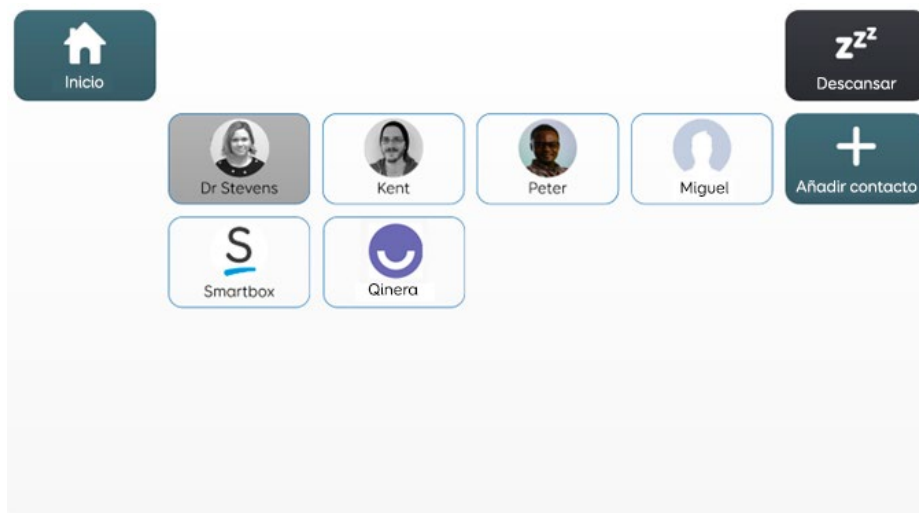

Fast Talker Celdas grandes - Contactos

Editar un contacto


Cuando seleccionas Editar contacto, cambiará a tu teclado y podrás editar el nombre del contacto. Si seleccionas Número y Correo electrónico, podrás editar estos campos. Cambiar foto te permite elegir una imagen de tu biblioteca de imágenes (incluyendo las fotos que has hecho con tu cámara). Cuando hayas terminado, selecciona **Guardar**.

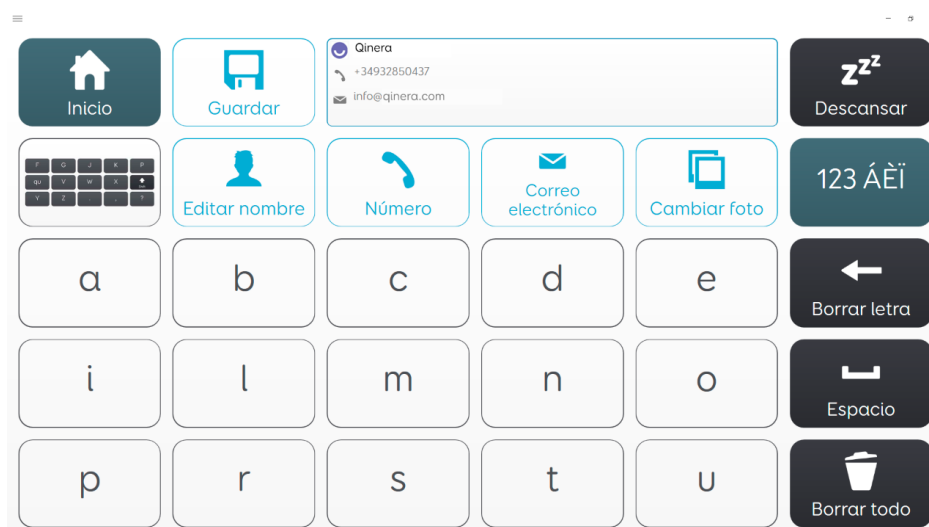

Celdas grandes de Fast Talker - Contactos - Editar

Ajustes

La cuadrícula de ajustes te permite controlar muchas opciones y ajustes de la cuadrícula.

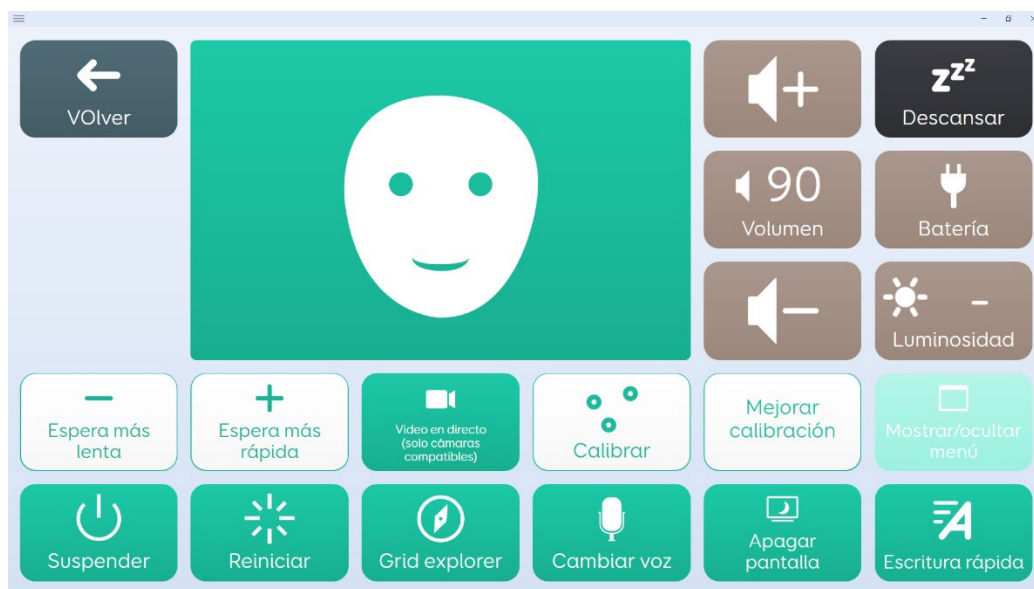

Fast Talker Celdas grandes - Ajustes

Visor de seguimiento de mirada	Ve una representación de la posición de tus ojos en relación con tu dispositivo.
Vídeo en directo del seguimiento de mirada	Algunas cámaras de seguimiento de mirada te permiten obtener una transmisión en vivo de la cámara que se mostrará dentro del visor de seguimiento de mirada. Esto cambiará el seguimiento de la mirada a vídeo si la cámara lo soporta y te permitirá ver lo que la cámara ve. Por ejemplo, puedes encontrar un reflejo que esté causando un problema.
Mejorar calibración	Inicia una calibración del seguimiento de mirada que se centra en puntos específicos. (Solo cámaras de seguimiento de mirada)
Volumen + -	Controla el volumen de tu voz.
Volumen	Muestra el volumen actual, al seleccionarlo se silencia la voz.
Batería	Muestra el nivel de batería actual.
Brillo	Al tocar la celda de brillo, se cicla el brillo de la pantalla del dispositivo en incrementos de 25.
Tiempo de espera más lento y más rápido	Ajustan el tiempo de espera tanto para el acceso de la mirada como para el puntero.

Calibrar	Empieza un nuevo calibrado del seguimiento de mirada.
Esconder/mostrar menú	Oculto o muestra el menú de Grid 3 en la parte superior de la pantalla. Para mostrar el menú fuera de la pantalla de Ajustes debes tocar la parte superior izquierda y la inferior derecha de la pantalla
Suspender	Pon el dispositivo en modo espera.
Reiniciar	Reinicia el dispositivo. Grid 3 se reabrirá si está configurado para abrirse al iniciar Windows.
Grid Explorer	Sal de Fast Talker y vuelve al Grid Explorer.
Cambiar voz	Abre la cuadrícula de cambio de voz, que te permite elegir entre tus voces instaladas y también puedes ajustar el volumen tanto de la voz que habla como del feedback auditivo.



Fast Talker Celdas grandes - Ajustes - Cambiar voz

Consejo: Si quieres cambiar tu voz de feedback auditivo puedes hacerlo en Menú, Configuración.

Pantalla en reposo	Apaga la pantalla para ahorrar batería y reducir las distracciones. Vuelve a encender la pantalla activando un conmutador o manteniendo la mirada en el centro de la pantalla.
Escritura rápida	Activa la función de escritura rápida globalmente, ve a la sección de Chat para más información.



Smartbox

Manual Fast Talker Manual (Version 1.0) Español (ES)

Copyright 2019 Smartbox Assistive Technology

Traducido por  **Qinera**

Para soporte, videotutoriales, webinars y más información, visítanos en thinksmartbox.com